

ProCare Dent 11 A

Reinigingsmiddel

Gebruik:

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch. Voor de automatische behandeling van tandheelkundige instrumenten in thermodesinfectoren van Miele Professional.

ProCare Dent 11 A ondersteunt de verwijdering van organische verontreiniging zoals bloed en speeksel en voorkomt opnieuw neerslaan. Grove resten van composieten, tandheelkundig cement en afdrukpasta moeten worden verwijderd voordat ze tijd hebben gehad om zich af te zetten.

ProCare Dent 11 A is niet geschikt voor het reinigen van transmissie-instrumenten. Hiervoor wordt het gebruik van het vloeibare reinigingsmiddel *ProCare Dent 10 MA* aanbevolen.

Kwaliteitskenmerken:

ProCare Dent 11 A voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.  

Als zich een ernstig incident voordoet met het product, meld dit dan aan de fabrikant en de relevante nationale autoriteit.

Producteigenschappen:

- Zeer goede materiaalcompatibiliteit.
- Bescherming tegen corrosie voor instrumenten en trays van roestvrij staal.


Gebruik en dosering:

ProCare Dent 11 A is geformuleerd voor gebruik in processen in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Dosering via deurdispenser voor poedervormige reinigingsmiddelen.
- Er moeten geschikte doseerdispensers worden gebruikt.
- Toepassingsconcentratie: 3 g/l
- Programmaselectie: Vario TD
- Minimum doseertemperatuur: $\geq 40^\circ\text{C}$

Gebruik altijd een identieke hoeveelheid reinigingsmiddel, bij voorkeur met behulp van de bijgevoegde doseerlepel.

Programmaverloop:

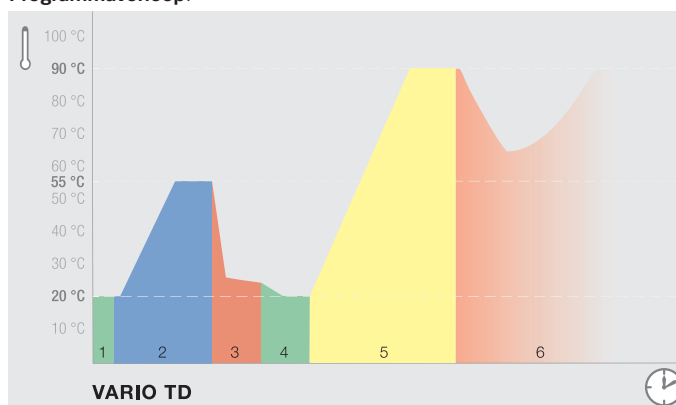

Vario TD-proces:

- 1 Voorspoelen**
Koud water (onthard), geen verwarming, geen proceschemicaliën
- 2 Hoofdreinigingsfase**
Koud/heet water (onthard), met verwarming, met *ProCare Dent 11 A*
- 3 Neutralisatie**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming, met *ProCare Dent 30 P*
- 4 Tussentijdse spoeling**
Koud/heet water (onthard) water, geen verwarming
- 5 Thermische desinfectie**
bij $> 90^\circ\text{C}$ met 5 minuten houdtijd in het naspoelen
- 6 Drogen**

Het product in de oplossing moet volledig worden afgespoeld met water. Aan het einde van het proces mogen er geen zichtbare restanten van het reinigingsmiddel aanwezig zijn. Bij thermodesinfectoren van Miele Professional wordt dit gegarandeerd door het Vario TD-programma bij juist gebruik (bijv. correct spoelgoed). Verificatie vindt plaats door de toename van de geleidbaarheid tijdens het naspoelen te meten tijdens ingebruikneming en routine-onderhoud.

Miele adviseert gedemineraliseerd water te gebruiken in de naspoeling om het spoelgoed en de thermodesinfecteur te beschermen tegen vlekken en aanslag.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- De behandeling moet voldoen aan alle verordeningen volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen en moet worden uitgevoerd met geschikte gevalideerde processen.
- Volg de aanbevelingen voor behandeling op van fabrikanten van medische hulpmiddelen met betrekking tot de bepalingen van DIN EN ISO 17664.
- Gebruiksaanwijzingen voor thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor professionele kwaliteit.

ProCare Dent 11 A

Reinigingsmiddel

Technische gegevens:

- Bulkdichtheid: ongeveer 1.015 g/l tot 1.065 g/l
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 3 g/l: ca. 11,5

Inhoudsstoffen volgens Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- < 5% niet-ionische tensiden
- > 30% fosfaten

Opslaginstructies:

- Opslagtemperatuur: 0 °C tot 30 °C
- Breng het deksel na gebruik stevig aan. Het product heeft de neiging om te gaan klonteren als het wordt blootgesteld aan vocht, waardoor het minder effectief kan worden.
- Kan 2 jaar gebruikt worden onder de juiste opslagomstandigheden.
- Houdbaarheidsdatum: zie etiket naast zandlopersymbool 

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatieblad. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze leeg en verzegeld zijn. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Alle informatie hierin is actueel en voor zover wij weten correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen proeven en experimenten uit te voeren. Dit kan niet worden beschouwd als een wettelijke garantie van productkenmerken of -eigenschappen.

Beschikbare verpakkingseenheden:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
ProCare Dent 11 A	Emmer van 10 kg

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 2
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
NIEDERLANDE
Tel. +31 347 378-9111
info@miele.nl
www.miele.nl

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
BELGIEN
Tel. +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlentzen 85
20539 Hamburg, Duitsland
www.drweigert.com