

## ProCare Dent 30 C

### Produto neutralizador

#### Utilização:

Concentrado líquido, ácido, à base de ácido cítrico. Para o reprocessamento mecânico de instrumentos dentários, incluindo instrumentos de transmissão em máquinas de lavar e desinfetar Miele Professional.

A utilização de *ProCare Dent 30 C* é particularmente recomendada quando os instrumentos não podem ser reprocessados com um produto neutralizador de ácido fosfórico (p. ex., instrumentos de transmissão).

#### Caraterística de qualidade:

*ProCare Dent 30 C* cumpre as especificações resultantes da legislação europeia relativa a dispositivos médicos. **CE MD**

Se surgir algum incidente grave com este produto, isto deve ser notificado ao fabricante e à autoridade competente.

#### Caraterísticas do produto:


- Boa compatibilidade de material
- Sem tensoativos

#### Utilização e dosagem:

O *ProCare Dent 30 C* da Miele foi concebido para os procedimentos nas máquinas de lavar e desinfetar da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora.
- Deve ter-se em atenção a resistência aos ácidos do material a lavar e dos tubos de esgoto.
- Para a dosagem devem ser utilizados aparelhos de dosagem adequados.
- Concentração de utilização: 1 ml/l
- Seleção do programa: varioTD

#### Sequência do programa:

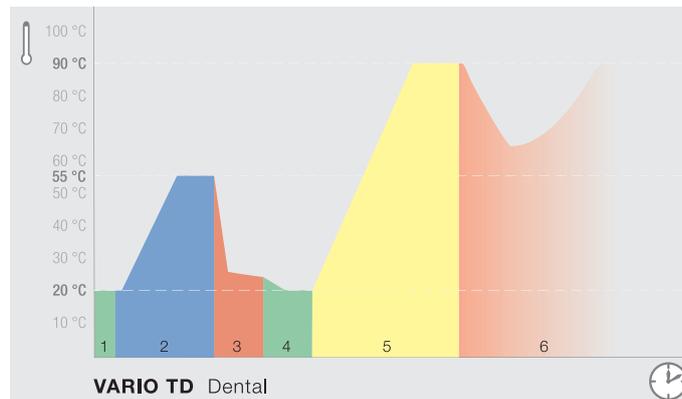

**Sequência do processo varioTD:**  
Pré-lavagem com água fria para eliminar sujidade grosseira (p. ex. sangue)  
Lavagem  
Neutralização com *ProCare Dent 30 C*  
Enxaguagem intermédia com água fria  
Desinfecção térmica a 93 °C durante 5 minutos  
tempo de retenção na enxaguagem final  
Secagem

A solução de aplicação deve ser totalmente enxaguada com água. Quando usado corretamente (p. ex. arrumação correta do material a lavar), ao utilizar em máquinas de lavar e desinfetar Miele Professional, isto é indicado pelo programa vario TD. Uma verificação ocorre através da medição do aumento da condutividade no ciclo de enxaguagem final no âmbito da colocação em funcionamento ou da manutenção de rotina da máquina de lavar e desinfetar.

Recomenda-se a utilização de água totalmente desmineralizada na enxaguagem final, de forma a evitar depósitos e manchas de água e a proteger o alumínio anodizado.

#### Tenha em atenção!

- Não misturar com outros produtos.
- Deve solicitar-se ao apoio ao cliente da Miele uma troca de produto.
- O reprocessamento deve ser efetuado de acordo com a legislação relativa a dispositivos médicos e com os regulamentos válidos com procedimentos adequados validados.
- Observe as recomendações de reprocessamento do fabricante dos dispositivos médicos conforme os requisitos da DIN EN ISO 17664.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar e desinfetar Miele Professional devem ser observadas.
- Só para aplicações no setor industrial.

## ProCare Dent 30 C

### Produto neutralizador

#### Dados técnicos:

- Densidade (20 °C): aprox. 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH (determinado em água totalmente desmineralizada a 20 °C) 1 ml/l: aprox. 3,0

#### Componentes do produto de limpeza de acordo com o Regulamento CE n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

- Agente de conservação (2-octil-2H-isotiazol-3-ona)

#### Indicações de armazenamento:

- Temperatura de armazenamento: -3 °C a 30 °C
- Com armazenamento adequado, utilizável durante 3 anos.
- Utilizável até: consultar a data na etiqueta atrás do símbolo 

No decorrer do período de armazenamento, pode haver variações de cor em recipientes originalmente fechados. As características técnicas de utilização não são influenciadas.

#### Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo.

Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consultar a ficha de dados de segurança.

Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características não pode ser derivada disto.

#### Unidades de embalagem e acessórios disponíveis

Designação	Recipiente	Número de material
ProCare Dent 30 C	Frasco de 1 l	12392460

#### Dados de contacto:

##### Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 800 22 44 644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Portugal

Miele Portuguesa Lda.  
Av. do Forte, n.º5  
2790-073 Carnaxide  
Tel.: +351 21 4248 425  
professional@miele.pt  
www.miele.pt/professional



##### Alemanha

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de