

# ProCare

Med 30 C

## Orgaaniseen happoon perustuva neutralointiaine

### Käyttöohjeet

#### Käyttö

ProCare Med 30 C on hapan neutralisointiaine, jota käytetään pesu- ja desinfektioilaitteissa uudelleenkäytettävien, lämmönkestävien ja lämpöherkkien, invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinällisten laitteiden, kuten kirurgisten, mikrokirurgisten ja mini-invasiivisissa leikkauksissa käytettävien instrumenttien, jäykkien endoskooppien sekä anestesia- ja hengityslaitteiden, osastotarvikkeiden, alumiinisten sterilointisäiliöiden ja muiden lääkinällisten laitteiden miedosti emäksisen automaattisen puhdistuksen jälkeen.

#### Ominaisuudet

ProCare Med 30 C on lievästi hapan neutralisointiaine, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- poistaa hellävaraisesti emäksiset jäämät käsittelyistä esineistä
- Voi pidentää instrumenttien käyttöikää estämällä läikkä emäksisillä pesuaineilla käsitellyissä esineissä, koska läikät voivat vahingoittaa materiaaleja korjaamattomasti käsitteilyn myöhemmissä vaiheissa, kuten steriloinnin aikana.
- soveltuu anestesiainmateriaaleille
- soveltuu alumiinille
- ei sisällä tensidejä
- fosfaatiton.

#### Materiaalien yhteensopivuus

Soveltuu seuraaville: ruostumaton teräs, (eloksoitu) alumiini, muovimateriaalit, kumi, lasi ja keramiikka.

Jos haluat lisätietoja muista kuin edellä mainituista materiaaleista, voit kysyä materiaalin yhteensopivuudesta paikalliselta edustajalta.

#### Annostelu ja käyttö

Optimaalinen annostelu riippuu pääasiassa emäksisten jäämien määrästä. Varmista ennen neutralointia, että pesuneste on tyhjennetty kokonaan.

Käytännössä 1–3 mL/L:n annostus tuottaa hyvät tulokset vähintään 1 minuutin neutralointikäsittelyllä emäksisillä pesuaineilla, kuten ProCare Med 10 MA -tuotteella, puhdistuksen jälkeen. Katso lisätietoja ProCare Med 10 MA -tuotteen käyttöohjeista.

ProCare Med 30 C -tuotteella tehdyn neutralointivaiheen jälkeen on suoritettava kunnollinen, vähintään yhden minuutin kestävä välihuuhtelu. Näin varmistetaan, että käsiteltyihin esineisiin ei jää jälkiä, ja voidaan ehkäistä korroosiota.

Miele- ja Steelco-pesu- ja desinfektioilaitteiden käyttöohjeissa on yksityiskohtaiset tiedot kokonaisista ohjelmista eri lääketieteen aloille.

#### Huomautus!

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa! • Jos vaihdat tuotteita, ota yhteys Miele-/Steelco-palveluun. • Käsittelyssä on noudatettava kaikkia lääkinällisiä laitteita koskevia asetuksia sekä asianmukaisia hyväksytyjä prosesseja. • Suorituskyvyn hyväksyntä vaaditaan kansallisten ohjeiden ja/tai EN ISO 15883 -standardin mukaisesti. • Lisäksi on noudatettava ISO 17664 -standardin määräyksiin liittyviä instrumenttien valmistajien antamia suosituksia uudelleen käsittelystä. • Miele-/Steelco-pesu- ja desinfektioilaitteiden käyttöohjeita on noudatettava. • Jos käytössä on muu kuin Mielen/Steelcon toimittama pesu- ja desinfektioilaitte, on noudatettava pesu- ja desinfektioilaitteen valmistajan toimittamia käyttöohjeita.

# ProCare

**Med 30 C**

## Orgaaniseen happoon perustuva neutralointiaine

**Tekniset tiedot**

Tiheys (tiiviste): 1.2 g/mL

pH-arvo (1 %:n liuos suoloista puhdistetussa vedessä): noin 2.6

Ulkonäkö (tiiviste): läpinäkyvä, väritön

**Ainesosat**

Orgaaninen happo

**Kuljetus ja varastointi**

Tuote on säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa.

**Hävittäminen ja kierrätys**

Säiliöt, kierrekorkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä. Käytettyjen säiliöiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia jätteen ja jäteveden käsittelymääräyksiä riippumatta siitä, sisältävätkö säiliöt tuotejäämiä tai käsittelyliuosta.

Lisätietoja käyttämättömän tuotteen hävittämisestä on käyttöturvallisuustiedotteessa.

**Turvallisuustiedot**

Lisätietoja työturvallisuudesta on käyttöturvallisuustiedotteessa.

**CE-merkintä**

ProCare Med 30 C täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

**Saatavuus**

Nykyisiä säiliökokoja koskevia tietoja saa paikalliselta edustajalta.

**Yhteystiedot****Saksa**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Suomi**

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Tel. +358 9 87597-500  
Fax +358 9 87597-299  
asiakaspalvelu@miele.fi  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional

**Italia**

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

**Valmistaja****Sveitsi**

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch