

# ProCare

Med 64 LUB 

## Smeermiddel voor handmatig gebruik

### Gebruiksaanwijzingen

#### Toepassing

ProCare Med 64 LUB is een hoogwaardig onderhoudsproduct voor instrumenten in sprayvorm, ontworpen voor handmatige verzorging van herbruikbare, invasieve en niet-invasieve, thermostabiele medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumenten met bewegende delen zoals gewrichten, scharnieren, schroefdraden, sluitingen en andere glijdende oppervlakken zoals klemmen, forceps, scharen, tangen, naaldhouders, haken, ligators etc. Het wordt aangebracht na zorgvuldige reiniging en desinfectie en voorafgaand aan stoomsterilisatie.

#### Eigenschappen

ProCare Med 64 LUB is een handmatig instrumentsmeermiddel met de volgende eigenschappen:

- Uitsluitend gebaseerd op witte olie van medische kwaliteit
- Vrij van enige vorm van potentieel allergene toevoegingen
- Laat een dunne film laag achter op behandelde oppervlakken om metaal-op-metaal wrijving te voorkomen
- Voorkomt metaal-op-metaal wrijving en beschermt scharnierende instrumenten effectief tegen wrijvingscorrosie, roest, aanslag, vlekken en voortijdige instrumentslijtage.
- Bewezen stoomdoorlatendheid
- Compatibel met stoomsterilisatie
- Toxicologisch veilig conform farmaceutische en voedingsregelgeving
- Spray-opzetstuk op elke gewenste lengte verstelbaar

#### Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor alle metalen die worden gebruikt in medische hulpmiddelen. Mogelijk niet geschikt voor polymeren (afhankelijk van het type polymeer)

Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

#### Dosering en toepassing

Voor een optimale instrumentonderhoud moeten instrumenten na zorgvuldige reiniging, desinfectie en droging voor het aanbrengen tot kamertemperatuur worden afgekoeld om slijtage van het metaal en beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Instrumenten moeten volledig droog zijn voordat ProCare Med 64 LUB wordt aangebracht.

Spray de verbindingen, scharnieren, glijvlakken, schroefdraad en andere bewegende delen kort en precies in met ProCare Med 64 LUB vanaf de kortst mogelijke afstand met behulp van het meegeleverde spray-opzetstuk. Houd de spuitbus verticaal tijdens het sprayen. Verplaats de bewegende delen om de verdeling van het smeermiddel te bevorderen. Overtollige olie moet voorafgaand aan de sterilisatie met een frisse, schone doek worden verwijderd.

#### Houd rekening met het volgende!

Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met betrekking tot de bepalingen van ISO 17664.

# ProCare

**Med 64 LUB** 

## Smeermiddel voor handmatig gebruik

### Technische gegevens

Dichtheid: 0,9 g/mL  
pH-waarde: neutraal  
Uiterlijk: kleurloos

### Ingrediënten

Medische witte olie (Pharm. Eur.), drijfgas (propan, butaan)

### Transport en opslag

Bewaar het product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.  
Bescherm het product tegen direct zonlicht en houd het uit de buurt van warmte- en ontstekingsbronnen.

### Informatie over verwijdering en recycling

De bus is gemaakt van recyclebaar aluminium. Voor het afvoeren van lege bussen moeten de plaatselijke afvalvoorschriften worden gevolgd.

### Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid en correcte verwijdering van ongebruikte producten.  
Voorkom de vorming van aerosolen, aerosolen niet inademen.

### CE-markering

ProCare Med 64 LUB voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

### Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

### Contactgegevens

#### Duitsland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN  
Tel.+31 347 378-884  
Fax+31 347 378-429  
professional@miele.nl  
serviceprofessional@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### Italië

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 MOLLEM  
Tel. +32 2 4511-540  
Fax +32 2 4511-414  
professional@miele.be  
www.miele.be/fr/professional  
www.miele.be/nl/professional

#### Fabrikant

##### Zwitserland

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch