

ProCare

Med 13 PRE

Gebrauchsanweisung

Mildalkalischer, enzymatischer Vorbehandlungsschaum

Verwendung

ProCare Med 13 PRE ist ein gebrauchsfertiger, mildalkalischer, enzymatischer Reinigungsschaum auf Basis einer speziellen Zusammensetzung aus Enzymen und Tensiden. Das Produkt hält wiederverwendbare invasive und nicht-invasive sowie thermostabile und thermolabile Medizinprodukte, die mit Blut und Geweberückständen verunreinigt sind, feucht und schützt sie dabei vor Korrosion, während sie von ihrem Einsatzort zum Ort der Aufbereitung gebracht werden. Medizinprodukte, die mit diesem Produkt behandelt werden können, sind z. B. chirurgische Instrumente und Utensilien, Instrumente der minimal invasiven Chirurgie oder starre Endoskope.

Produkteigenschaften

Basierend auf einer speziellen enzymatischen Formulierung sorgt ProCare Med 13 PRE dafür, dass Instrumente feucht bleiben. Zusätzlich bietet das Produkt folgende Eigenschaften:

- Minimiert das Anhaften organischer Verschmutzungen, die durch Operationen entstehen, und erleichtert somit die Reinigung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Schützt vor Korrosion
- Leicht abspülbar bereits bei Umgebungstemperatur
- Stabiler Schaum
- Geeignet für Aluminium und eloxiertes Aluminium
- Sicher und nachhaltig für Anwender und Patient

Materialverträglichkeit

Geeignet für Edelstahl, (eloxiertes) Aluminium, Titan und andere Nichteisenmetalle, verchromte Materialien, Kunststoffe, Elastomere einschließlich Polyurethan und Silikon, Polytetrafluorethylen (PTFE, z. B. Teflon), Gummi, Latex, Glas und Keramik. Keine Materialverträglichkeit bekannt.

Für Materialien, die oben nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um in Erfahrung zu bringen, ob das Produkt für das Material geeignet ist.

Dosierung und Anwendung

ProCare Med 13 PRE ist ein gebrauchsfertiges Schaumspray, das sofort nach dem Einsatz eines Medizinprodukts direkt auf die verschmutzten Produktstellen angewendet wird. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollte der Schaum so aufgesprüht werden, dass er die Instrumentenfläche vollständig bedeckt und befeuchtet.

Ein Abspülen des Schaums vor der weiteren Aufbereitung oder ein gründliches Vorspülen im Reinigungs- und Desinfektionsgerät trägt zur Stabilität des maschinellen Aufbereitungsprozesses bei.

Bitte beachten!

Nicht mit anderen Produkten mischen. • Vor einem Produktwechsel wenden Sie sich bitte an Miele/Steelco. • Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der ISO 17664.

ProCare

Med 13 PRE

Mildalkalischer, enzymatischer Vorbehandlungsschaum

Technische Daten

Dichte (gebrauchsfertige Lösung): 1.0 g/mL

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ca. 8.4

Aussehen (gebrauchsfertige Lösung): klar, farblos

Inhaltsstoffe

Tenside, Enzyme, Lösungsvermittler, Konservierungsstoffe

Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C zu transportieren und zu lagern. Dieses Medizinprodukt ist kälteempfindlich. Wenn die Umgebungstemperatur beim Transport voraussichtlich unter 5 °C liegt, muss das Produkt in einem temperaturgeregelten LKW/Seefrachtcontainer bei einer Temperatur von mehr als 5° C transportiert werden. Oder verwenden Sie Schutzabdeckungen bei Transporten, die länger als 10 Stunden dauern und bei denen die Umgebungstemperatur nicht unter minus 5 °C fällt.

Entsorgung und Recycling

Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycelbarem Polyethylen. Für die Entsorgung gebrauchter Behälter, einschliesslich solcher mit Produktrückständen und aufbereiteter Lösung, müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften beachtet werden. Für die Entsorgung des ungebrauchten Produkts beachten Sie bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Informationen zur Arbeitssicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung

ProCare Med 13 PRE erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

Verfügbarkeit

Bei Fragen zu aktuellen Behältergrössen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Kontaktdaten

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Geschäftsbereich Professional
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 800 22 44 644
Fax +49 800 33 55 533
vertrieb@miele-professional.de
service@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Hersteller

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch