

ProCare

Med 13 PRE

Enzymatyczna pianka o łagodnie zasadowym odczynie do obróbki wstępnej

Instrukcja użytkowania

Zastosowanie

ProCare Med 13 PRE to gotowa do użycia, łagodnie zasadowa, enzymatyczna pianka czyszcząca na bazie specjalnej kombinacji enzymów i środków powierzchniowo czynnych przeznaczona do utrzymywania wilgoci termostabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, inwazyjnych i nieinwazyjnych zanieczyszczonych krwią i tkanką organiczną, takich jak narzędzia i przyrządy chirurgiczne, instrumenty MIS, sztywne endoskopy i inny sprzęt medyczny, oraz do ich ochrony przed korozją podczas transportu z miejsca ich użycia do obszaru przygotowania do użycia.

Właściwości

Dzięki specjalnej, enzymatycznej formule ProCare Med 13 PRE skutecznie nawilża narzędzia i oferuje następujące właściwości:

- Minimalizuje przywieranie organicznych zanieczyszczeń chirurgicznych, a tym samym ułatwia czyszczenie w myjni-dezynfektorze
- Chroni przed korozją
- Dobra spłukiwalność już w temperaturze otoczenia
- Stabilna piana
- Nadaje się do aluminium i anodowanego aluminium
- Produkt bezpieczny i zrównoważony względem potrzeb użytkownika i pacjenta

Zgodność materiałowa

Nadaje się do stali nierdzewnej, (anodowanego) aluminium, tytanu i innych metali nieżelaznych, materiałów chromowanych, tworzyw sztucznych, elastomerów, w tym poliuretanu i silikonu, politetrafluoroetyleny (PTFE, np. teflonu), gumy i lateksu, szkła i materiałów ceramicznych. Nie jest znana żadna niezgodność materiałowa.

W przypadku materiałów niewymienionych powyżej prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu ustalenia, czy materiał jest odpowiedni.

Dozowanie i użycie

ProCare Med 13 PRE to gotowy do użycia aerozol piankowy do nakładania bezpośrednio na zanieczyszczone przedmioty w miejscu użycia wyrobu medycznego natychmiast po użyciu. Należy go rozpylać w taki sposób, aby zapewnić całkowite pokrycie i zwilżenie instrumentów, aby uzyskać optymalną skuteczność.

Spłukiwanie pianki przed dalszą obróbką lub wystarczające płukanie wstępne w myjni-dezynfektorze może być korzystne dla stabilności procesu maszynowego.

Uwaga!

Nie mieszać z innymi produktami! • W przypadku zmiany produktów należy skontaktować się z serwisem Miele/Steelco. • Należy postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie dekontaminacji wydanymi przez producentów narzędzi z uwzględnieniem przepisów ISO 17664.

ProCare

Med 13 PRE

Enzymatyczna pianka o łagodnie zasadowym odczynie do obróbki wstępnej

Dane techniczne

Gęstość (roztwór gotowy do użycia): 1.0 g/mL

Wartość pH (roztwór gotowy do użycia): ok. 8.4

Wygląd (roztwór gotowy do użycia): przezroczysty, bezbarwny

Skład

Surfaktanty, enzym, solubilizatory, konserwanty

Transport i przechowywanie

Transportować i przechowywać produkt w temperaturze od 5°C do 25°C.

Ten wyrób medyczny jest wrażliwy na niskie temperatury. Jeśli temperatura otoczenia podczas transportu może być niższa niż 5°C, produkt ten należy transportować za pomocą kontenera ciężarowego/morskiego z kontrolowaną temperaturą powyżej 5°C lub używać kapturów ochronnych do transportu dłuższego niż 10 godzin, przy temperaturze transportu nie spadającej poniżej -5°C.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Pojemniki, nakrętki i etykiety zostały wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu. Przy utylizacji zużytych pojemników, w tym pojemników z pozostałościami produktu i przetworzonym roztworem, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i ścieków.

Informacje dotyczące utylizacji niewykorzystanego produktu dostępne są w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy dostępne są w karcie charakterystyki.

Oznaczenie CE

ProCare Med 13 PRE spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Dostępność

Zapytaj lokalnego przedstawiciela o obecne wymiary pojemników.

Dane kontaktowe

Niemcy

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
Fax +48 22 548-4010
info@miele.pl
www.miele.pl/professional

Włochy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Producent

Szwajcaria

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch