

ProCare

Med 10 PRE

Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor handmatig gebruik

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

ProCare Med 10 PRE is een behoedzaam reinigingsmiddel voor de grondige handmatige verwerking van herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumenten en gebruiksvoorwerpen, instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie, starre endoscopen, anesthesieapparatuur etc.

Het is ook geschikt voor het inweken van instrumenten voorafgaand aan geautomatiseerde verwerking, waardoor het risico van instrumentcorrosie en het uitdrogen van vervuilde oppervlakken wordt verminderd.

ProCare Med 10 PRE is ook geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden.

Eigenschappen

Met een optimale mix van oppervlakte-actieve stoffen biedt ProCare Med 10 PRE de volgende eigenschappen:

- pH-neutraal
- Breed spectrum van materiaalcompatibiliteit
- Op basis van NTA- en fosfaatvrije formules
- Uitstekend biologisch afbreekbaar

Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor RVS, (geanodiseerd) aluminium, non-ferro metalen, PVC, rubber, kunststoffen, keramiek.

Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

Dosering en toepassing

Toepassing	Dosering	Opmerkingen
Handmatige (voor)reiniging van medische hulpmiddelen	0,5 – 1,0 %	Instrumenten 2 – 15 min. inweken, indien nodig borstelen. Gebruik de oplossing slechts één keer.
Ultrasone reiniging	0,5 – 1,0 %	Ca. 5 minuten ultrasoonapparaat gebruiken.
Inweken van instrumenten voorafgaand aan automatische reiniging	0,2 – 0,5 %	Gebruik de oplossing slechts één keer.

Spoel instrumenten na reiniging of voordat ze in het was- en desinfectieapparaat worden geplaatst met water af.

Houd rekening met het volgende!

Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt • De verwerking moet voldoen aan alle verordeningen conform de voorschriften voor medische hulpmiddelen en dient middels geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten zoals vereist door ISO 17664.

ProCare

Med 10 PRE

Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor handmatig gebruik

Technische gegevens

Dichtheid (concentraat): 1,1 g/mL

pH-waarde (1 % oplossing in gedemineraliseerd water): ca. 7,5

Uiterlijk (concentraat): transparant, kleurloos tot geel

Ingrediënten

Oppervlakte-actieve stoffen, complexvormers, corrosieremmers

Transport en opslag

Transporteer en bewaar dit product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.

Dit medisch hulpmiddel is gevoelig voor lage temperaturen. Als de omgevingstemperatuur van het transport waarschijnlijk lager is dan 5 °C, moet dit product worden vervoerd met een temperatuurgecontroleerde vrachtwagen/zeecontainer boven 5 °C, of met gebruik van beschermhoezen/kappen waarbij de omgevingstemperatuur niet langer dan 10 uur onder minus 5 °C komt.

Informatie over verwijdering en recycling

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing, dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.

CE-markering

ProCare Med 10 PRE voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

Contactgegevens

Duitsland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Tel.+31 347 378-884
Fax+31 347 378-429
professional@miele.nl
serviceprofessional@miele.nl
www.miele.nl/professional

Italië

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabrikant

Zwitserland

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch