

ProCare

Med 10 PRE

Detergente ecologico per uso manuale

Istruzioni d'uso

Applicazione

ProCare Med 10 PRE è un detergente delicato per il ricondizionamento manuale completo di dispositivi medici riutilizzabili, termostabili, invasivi e non-invasivi, come strumenti e utensili chirurgici, strumenti MIS, endoscopi rigidi, apparecchi per anestesia ecc.

È anche idoneo all'immersione di strumenti prima del trattamento automatizzato, riducendo pertanto il rischio di corrosione degli strumenti e di essiccazione dello sporco in superficie.

ProCare Med 10 PRE è adatto anche all'utilizzo per bagni a ultrasuoni.

Proprietà

Grazie alla miscela ottimale di tensioattivi, ProCare Med 10 PRE offre le seguenti proprietà:

- pH neutro
- Ampio spettro di compatibilità dei materiali
- Basato su una formula priva di NTA e fosfati
- Eccellente biodegradabilità

Compatibilità dei materiali

Adatto ad acciaio inossidabile, alluminio (anodizzato), metalli non ferrosi, PVC, gomma, materie plastiche, ceramica.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

Dosaggio e applicazione

Applicazione	Dosaggio	Note
(Pre)pulizia manuale di dispositivi medici	0,5 – 1,0 %	Lasciare gli strumenti in immersione per 2 – 15 minuti. Spazzolare, se necessario. Utilizzare la soluzione una sola volta.
Pulizia a ultrasuoni	0,5 – 1,0 %	Circa 5 minuti di sonicazione.
Immersione di strumenti prima della pulizia automatizzata	0,2 – 0,5 %	Utilizzare la soluzione una sola volta.

Risciacquare gli strumenti con acqua dopo la pulizia o prima del caricamento nel termodesinfettatore.

Attenzione!

Non miscelare con altri prodotti! • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Il trattamento deve essere conforme a tutte le ordinanze previste dai regolamenti sui dispositivi medici e deve essere eseguito tramite idonei processi validati. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione come richiesto dalla norma ISO 17664.

ProCare

Med 10 PRE

Detergente ecologico per uso manuale

Dati tecnici

Densità (concentrato): 1,1 g/mL

Valore di pH (soluzione all'1% in acqua demineralizzata): circa 7.5

Aspetto (concentrato): trasparente, da incolore a giallo

Componenti

Tensioattivi, agenti complessanti, inibitori di corrosione

Trasporto e conservazione

Conservare il prodotto il presente prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

Il presente dispositivo medico è sensibile alle temperature fredde. Se si prevede che la temperatura ambiente di trasporto sia inferiore a 5 °C, il presente prodotto deve essere spedito in camion/container marittimo a temperatura controllata superiore a 5 °C o utilizzando coperture protettive per il trasporto in caso di temperatura ambiente non inferiore a -5 °C per più di 10 ore.

Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio

I contenitori, i tappi a vite e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile. Per lo smaltimento dei contenitori usati, inclusi quelli contenenti residui di prodotto e soluzione trattata, attenersi ai regolamenti locali sullo smaltimento di rifiuti e acque reflue.

Per lo smaltimento di prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Marcatura CE

ProCare Med 10 PRE è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

Disponibilità

Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

Dati di contatto**Germania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H
Strada di Circonvallazione, 27
39057 San Michele Appiano (BZ)
Tel. +39 0471 666319
Fax +39 0471 666350
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional
www.miele.it/de/professional

Italy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Produttore**Svizzera**

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch