

ProCare

Dent 30 P

Neutralisationsmittel

Verwendung:

Flüssigkonzentrat, sauer, auf Basis von Phosphorsäure. Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

ProCare Dent 30 P ist nicht geeignet für Übertragungsinstrumente, Materialien aus Buntmetall, eloxiertes Aluminium sowie verchromte und vernickelte Teile. Für die Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten ist das Neutralisationsmittel *ProCare Dent 30 C* vorgesehen.

Qualitätsmerkmal:

ProCare Dent 30 P erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung. 

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Produkteigenschaften:


- Entfernt Anlauffarben und säurelösliche Verunreinigungen
- Sehr gute Abspülbarkeit
- Frei von Tensiden

Anwendung und Dosierung:

Miele *ProCare Dent 30 P* ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Thermo-Desinfektoren

- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Auf Säurebeständigkeit des Spülgutes und der Abflussleitungen ist zu achten
- Anwendungskonzentration: 1 ml/l
- Programmwahl: Vario TD

Programmablauf:

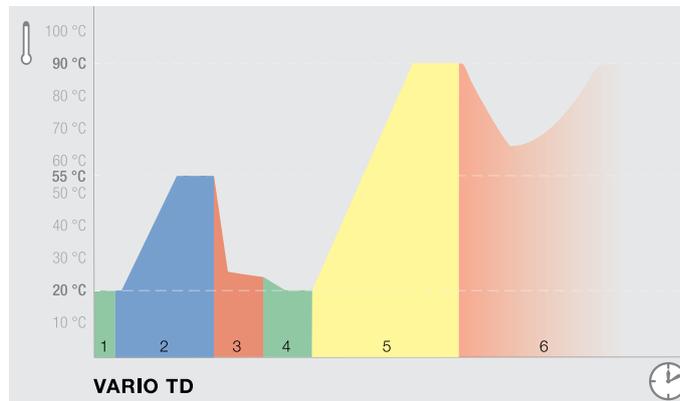

Verfahrensablauf

Vario TD:

- 1 Vorspülen mit kaltem Wasser, um grobe Verschmutzungen (z. B. Blut) zu beseitigen
- 2 Reinigen
- 3 Neutralisieren mit *ProCare Dent 30 P*
- 4 Zwischenspülen mit kaltem Wasser
- 5 Thermische Desinfektion bei 93 °C für 5 Minuten inkl. Schlusspülung
- 6 Trocknen

Die Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspolen. Beim Einsatz in Miele Professional Thermo-Desinfektoren ist dies bei korrekter Anwendung (z. B. korrektes Einsortieren des Spülgutes) durch das Vario TD Programm gegeben. Eine Verifizierung erfolgt durch die Messung der Leitwerterhöhung im Schlusspülgang im Rahmen der Inbetriebnahme oder Routinewartung des Thermo-Desinfektors. Es wird der Einsatz von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen, um Beläge und Wasserflecken zu vermeiden.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Für einen Produktwechsel ist der Miele Kundendienst anzufordern.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Thermo-Desinfektoren sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

ProCare Dent 30 P

Neutralisationsmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,5 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 1 ml/l: ca. 2,3

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- > 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: -15 °C bis 30 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheiten und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
<i>ProCare Dent 30 P</i>	1 l Flasche (Deckel mit Einfüllstutzen)	12 187 370
<i>ProCare Dent 30 P</i>	5 l Kanister	12 187 380
Kanisterschlüssel	Für 5 l und 20 l Kanister	11 851 600
DTD2 Auffangschale	Für 5 l und 10 l Kanister	10 695 460

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxemburg
Telefon +352 (0) 4971125
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Italien

Miele Italia Srl
Strada die Circonvallazione 27,
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Deutschland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de