

ProCare Dent 40

Aditivos

Utilización:

Concentrado líquido. Para la preparación a máquina de instrumental odontológico, incluido el instrumental de transmisión, en las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

Características de calidad:

ProCare Dent 40 cumple los requisitos derivados de la normativa europea sobre productos sanitarios.



Si se produce un incidente grave con este producto, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Características del producto:


- Mejora y acelera el secado del instrumental dental durante su preparación
- Neutralización de los residuos alcalinos arrastrados y de las aguas alcalinas

Aplicación y dosificación:

Miele *ProCare Dent 40* se adapta a las secuencias de proceso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

- Para la dosificación deben utilizarse dosificadores adecuados.
- Concentración de la aplicación: 0,3 ml/l mediante el dosificador para el abrillantador situado en la puerta
- Programa: Vario TD

Desarrollo del programa:

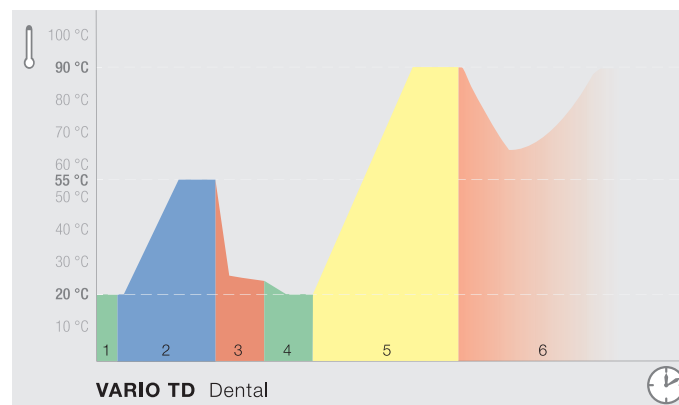

Desarrollo de procedimientos Vario TD

- Prelavado**
con agua fría para eliminar la suciedad espesa (por ejemplo, la sangre)
- Limpieza**
- Neutralización**
- Aclarado intermedio**
con agua fría
- Desinfección térmica**
a 93 °C durante 5 minutos, incluido el aclarado final con *ProCare Dent 40* (temperatura de dosificación 70 °C)
- Secado**

Se recomienda el uso de agua completamente desmineralizada en el aclarado final para evitar la formación de depósitos y manchas de agua y para proteger el aluminio anodizado.

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Para la sustitución del producto, contactar con el Servicio Post-venta de Miele.
- La preparación debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, utilizando procedimientos adecuados y validados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de preparación del fabricante del dispositivo médico de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- Deben respetarse las instrucciones de uso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.
- Solo para uso industrial.

ProCare Dent 40

Aditivos


Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): aprox. 1,1 g/cm³
- Valor pH (Determinado con agua completamente desmineralizada, 20 °C) 0,3 ml/l: aprox. 3,8

Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- < 5 % fosfonatos
- 15 % a 30 % de tensioactivos no iónicos
- También conservantes (metilcloroisotiazolinonas / metilisotiazolinonas)

Indicaciones de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento: 0 °C hasta 30 °C
- Válido durante 3 años si se conserva correctamente
- Usar hasta: ver impresión en la etiqueta junto al símbolo 

Indicaciones de peligro e indicaciones de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias. De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Unidad de empaquetado suministrada:

Denominación	Envase	Número de material
ProCare Dent 40	Botella de 1 l	12392650

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 Alcobendas/Madrid
Tel.: +34 91 623 20 00
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de