

ProCare

Med 64 LUB

Lubrificante para aplicações manuais

Instruções de utilização

Aplicação

O ProCare Med 64 LUB é um produto de alta qualidade para a manutenção de instrumentos em spray, concebido para o cuidado manual de dispositivos médicos reutilizáveis, invasivos e não invasivos e termoestáveis, tais como instrumentos cirúrgicos com peças móveis como juntas, dobradiças, roscas, fechos e outras superfícies deslizantes tais como peças de junção, fórceps, tesouras, punções, porta-agulhas, retratores, ligadores, etc. É aplicado após a limpeza e desinfeção cuidadosa e antes da esterilização a vapor.

Propriedades

O ProCare Med 64 LUB é um lubrificante manual para instrumentos com as seguintes propriedades:

- Exclusivamente à base de óleo branco de uso médico
- Livre de qualquer tipo de aditivos potencialmente alergénicos
- Deixa uma película fina em superfícies tratadas para evitar a fricção de metal com metal
- Evita a fricção de metal com metal protegendo eficazmente instrumentos articulados contra a corrosão por atrito, ferrugem, embaciamento, manchas e desgaste prematuro dos instrumentos.
- Permeabilidade ao vapor comprovada
- Compatível com esterilização a vapor
- Toxicologicamente seguro de acordo com a regulamentação farmacêutica e alimentar
- Acessório de pulverização ajustável a qualquer comprimento necessário

Compatibilidade de materiais

Adequado para todos os metais normalmente utilizados nos dispositivos médicos. A incompatibilidade com polímeros pode existir dependendo do tipo de polímero.

Para saber sobre materiais não mencionados acima, por favor, contacte o seu representante local para verificar se o material é adequado.

Dosagem e aplicação

Para o cuidado ideal do instrumento, após uma limpeza cuidadosa, desinfeção e secagem, os instrumentos devem ser arrefecidos à temperatura ambiente antes da aplicação, para evitar a abrasão do metal e danos na superfície. Os instrumentos devem estar completamente secos antes da aplicação do ProCare Med 64 LUB.

Pulverize as juntas, dobradiças, superfícies deslizantes, roscas e outras peças móveis com o ProCare Med 64 LUB de forma breve e seletiva a partir da distância mais curta possível, utilizando o acessório de pulverização fornecido. Mantenha o spray na vertical no momento da pulverização. O movimento subsequente das peças móveis promove a distribuição do lubrificante. O excesso de óleo deve ser removido antes da esterilização com um pano fresco e limpo.

Atenção!

Não misture com outros produtos! • Ligue para a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • Siga as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes de instrumentos, no que diz respeito às disposições da norma ISO 17664.

ProCare

Med 64 LUB

Lubrificante para aplicações manuais

Dados técnicos

Densidade: 0,9 g/mL

Valor de pH: neutro

Aparência: incolor

Ingredientes

Óleo branco medicinal (Pharm. Eur.), propelente (propano, butano)

Transporte e armazenamento

Armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

Proteja o produto da luz solar direta e mantenha longe de fontes de calor e de ignição.

Informações sobre eliminação e reciclagem

A lata é feita de alumínio reciclável. Para a eliminação de latas vazias, devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo.

Informações sobre segurança

Para saber informações sobre segurança no trabalho e sobre eliminação apropriada de produtos não utilizados, consulte a ficha de dados de segurança.

Evite a formação de aerossóis, não inale aerossóis.

Marcação CE

O ProCare Med 64 LUB cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Disponibilidade

Consulte o seu representante local para obter informações sobre os tamanhos de recipientes atualmente disponíveis.

Dados de contacto**Alemanha**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa Lda.
Av. do Forte, n°5
2790-073 CARNAXIDE
Tel. +351 21 4248-100
Fax +351 21 4248-109
professional@miele.pt
professionalservice@miele.pt
www.miele.pt/professional

Itália

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante**Suíça**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch