

ProCare

Med 10 A

Detergente alcalino multiusos para el procesamiento automatizado

Instrucciones de uso

Aplicación

ProCare Med 10 A es un detergente alcalino respetuoso con los materiales para usar en lavadoras desinfectadoras para el procesamiento automatizado de dispositivos médicos reutilizables, termoestables, invasivos y no invasivos, como instrumental quirúrgico, instrumental microquirúrgico e instrumental MIC, así como equipo de anestesia, material para respiración asistida y cualquier otro equipo médico.

Propiedades

ProCare Med 10 A es un detergente alcalino que cuenta con las siguientes propiedades:

- Eliminación de la sangre, los residuos del tejido y las proteínas de forma cuidadosa y eficaz.
- Una excelente eliminación de contaminantes y dispersión de propiedades.
- Desarrollado de forma específica para su uso en equipos de limpieza y desinfección.
- Excelente compatibilidad con otros materiales.
- Sin tensioactivos ni álcalis cáusticos.

Compatibilidad con materiales

Compatible con acero inoxidable, materiales plásticos, elastómeros, caucho, látex, cerámica y vidrio. No compatible con aluminio (anodizado) ni titanio.

Para los materiales que no se hayan mencionado anteriormente, póngase en contacto con el delegado comercial quien le informará de si es adecuado o no.

Dosificación y aplicación

La dosificación óptima depende de factores como la dureza del agua y el origen de la contaminación. Por lo general, el uso de agua descalcificada mejora los resultados de limpieza. Por lo tanto, se puede reducir la cantidad dosificada.

En la práctica, una dosificación de 3 a 10 mL/L garantiza unos buenos resultados con un mínimo de 10 minutos a 60 °C.

Se debe garantizar un aclarado intermedio adecuado después de la fase de limpieza con agua o ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C en caso de material de anestesia) durante al menos 1 min. Consulte las instrucciones de uso de ProCare Med 30 P para obtener más detalles.

En el caso de las lavadoras desinfectadoras Miele y Steelco, podrá consultar información específica sobre los ciclos del programa indicados para las distintas disciplinas médicas en sus instrucciones de uso correspondientes.

Tenga en cuenta lo siguiente

No mezclar con otros productos. • Llamar al servicio técnico de Miele/Steelco a la hora de cambiar productos. • El procesado debe cumplir todas las disposiciones en virtud de la normativa de dispositivos médicos y deberá llevarse a cabo mediante procesos apropiados y validados. • De acuerdo con las normativas nacionales o con la norma EN ISO 15883, se deberá llevar a cabo una cualificación del rendimiento. • Seguir las recomendaciones sobre el tratamiento posterior emitido por los fabricantes del instrumental en relación con las disposiciones de la norma ISO 17664. • Se deben seguir las instrucciones operativas relacionadas con las lavadoras desinfectadoras Miele/Steelco. • Si se va a utilizar en lavadoras desinfectadoras que no sean de la marca Miele/Steelco, consulte al fabricante de la lavadora desinfectadora y sus instrucciones de uso.

ProCare

Med 10 A

Detergente alcalino multiusos para el procesamiento automatizado

Ficha técnica

Densidad (concentrado): 1.4 g/mL

Valor pH (solución al 1 % en agua desmineralizada): aprox. 11.3

Aspecto (concentrado): transparente, incoloro

Ingredientes

Álcalis, agentes complejos, inhibidor de la corrosión, agentes secuestrantes

Transporte y almacenamiento

Almacene el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los envases, los tapones de rosca y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Para la eliminación de envases utilizados, incluidos los que contengan producto residual y solución procesada, se deben seguir las directrices locales sobre residuos y sobre aguas residuales.

Para obtener información sobre la eliminación de un producto sin utilizar, consulte la ficha técnica de seguridad.

Información sobre seguridad

Para obtener información sobre seguridad laboral, consulte la ficha técnica de seguridad.

Marcado CE

ProCare Med 10 A cumple con los requisitos para los productos sanitarios en conformidad con el Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, consulte a su representante.

Información de contacto

Alemania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
Fax +34 916620266
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante

Suiza

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch