

ProCare

Med 10 A

Detergente alcalino multiusos para processamento automático

Instruções de utilização

Aplicação

O ProCare Med 10 A é um detergente alcalino, amigo do material, para máquinas de lavar e desinfetar para o reprocessamento automático de dispositivos médicos, reutilizáveis, termoestáveis, invasivos e não invasivos, tais como instrumentos cirúrgicos, microcirúrgicos e MIS, equipamentos anestésicos e respiratórios e outros equipamentos médicos.

Propriedades

O ProCare Med 10 A é um detergente alcalino com as seguintes propriedades:

- Remove sangue, resíduos de tecido, proteínas de forma cuidadosa e eficaz.
- Excelentes propriedades de remoção e dispersão de contaminantes.
- Especialmente desenvolvido para utilização em máquinas de lavar e desinfetar.
- Excelente compatibilidade de materiais
- Livre de tensoativos e álcalis cáusticos

Compatibilidade de materiais

Adequado para aço inoxidável, materiais plásticos, elastómeros, borracha, látex, cerâmica e vidro. Não compatível com alumínio (anodizado) e titânio.

Para saber sobre materiais não mencionados acima contacte o seu representante local para verificar se o material é adequado.

Dosagem e aplicação

A dosagem ideal depende de fatores como a dureza da água e a natureza da contaminação. No geral, a utilização de água descalcificada melhora os resultados de limpeza. Consequentemente, a dosagem pode ser reduzida.

Na prática, uma dosagem de 3 a 10 mL/L proporciona bons resultados com um mínimo de 10 minutos a 60 °C.

Garanta uma enxaguagem intermédia adequada após a fase de limpeza com água ou com ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C no caso de material anestésico) durante pelo menos 1 minuto. Consulte as instruções de utilização do ProCare Med 30 P para obter mais informações.

No caso das máquinas de lavar e desinfectar da Miele e Steelco, são fornecidas informações específicas sobre os ciclos completos do programa para diferentes disciplinas médicas nas suas respetivas instruções de uso.

Atenção!

Não misture com outros produtos! • Ligue para a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • O reprocessamento deve cumprir todos os decretos de acordo com os regulamentos dos dispositivos médicos e deve ser executado com processos apropriados e validados. • Em conformidade com as diretivas nacionais e/ou com a norma EN ISO 15883, é necessária uma qualificação do rendimento. • Siga as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes de instrumentos, no que diz respeito às disposições da norma ISO 17664. • Deve seguir as instruções de funcionamento relativas às máquinas de lavar e desinfetar Miele/Steelco. • Para a utilização em máquinas de desinfetar que não sejam fornecidas pela Miele/Steelco, consulte o manual de instruções e indicações do fabricante da máquina de lavar e desinfetar.

ProCare

Med 10 A

Detergente alcalino multiusos para processamento automático

Dados técnicos

Densidade (concentrado): 1,4 g/mL

Valor de pH (solução a 1% em água desmineralizada): aprox. 11.3

Aparência (concentrado): transparente, incolor

Ingredientes

Álcalis, agentes complexantes, inibidor de corrosão, agentes quelatantes

Transporte e armazenamento

Armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

Informações sobre eliminação e reciclagem

Recipientes, tampas de rosca e rótulos são feitos de polietileno reciclável. Para eliminar recipientes usados, incluindo aqueles que tenham produtos residuais e solução processada, devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo e às águas residuais.

Para a eliminação de produtos não utilizados consulte a ficha de dados de segurança.

Informações sobre segurança

Para saber informações sobre segurança no trabalho consulte a ficha de dados de segurança.

Marcação CE

O ProCare Med 10 A cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Disponibilidade

Consulte o seu representante local para obter informações sobre os tamanhos de recipientes atualmente disponíveis.

Dados de contacto

Alemanha

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa Lda.
Av. do Forte, n°5
2790-073 CARNAXIDE
Tel. +351 21 4248-100
Fax +351 21 4248-109
professional@miele.pt
professionalservice@miele.pt
www.miele.pt/professional

Itália

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante

Suíça

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch