

ProCare

Med 10 MA

Milt alkaliskt allroundrengöringsmedel för automatiserad bearbetning

Bruksanvisning

Användning

ProCare Med 10 MA är ett materialvänligt rengöringsmedel för diskdesinfektorer framställt av en avancerad kombination av enzymer och ytaktiva ämnen för automatiserad bearbetning av återanvändbara, värmestabila och värmekänsliga, invasiva och icke-invasiva medicintekniska produkter som exempelvis kirurgiska, mikrokirurgiska och MIS-instrument, stela endoskop, anestesi- och ventilationsutrustning, redskap för vårdavdelningar, steriliseringsbehållare i aluminium och annan medicinsk utrustning.

Egenskaper

Tack vare sin unika sammansättning och formulering avlägsnar ProCare Med 10 MA effektivt ett brett spektrum av organiska föroreningar som exempelvis blod, vävnadsrester och slemhinna från medicinska instrument i en mängd olika material. Förutom sin effektivitet och sitt breda användningsområde har ProCare Med 10 MA följande egenskaper:

- Utmärkt materialkompatibilitet.
- lågskummande
- möjligt att använda med eller utan neutralisering
- EDTA-fritt
- NTA-fritt
- fritt från parfym och färgämnen
- biologiskt nedbrytbart.

Materialkompatibilitet

Lämpligt för rostfritt stål, (anodiserat) aluminium, titan, icke-järnmetaller som används i medicintekniska produkter, förkromade material, plastmaterial, elastomerer som exempelvis polyuretan och silikon, gummi, latex, polytetrafluoreten (PTFE, t.ex. teflon), keramik och glas. Det finns ingen känd materialinkompatibilitet.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

Dosering och användning

Optimal dosering beror på faktorer som exempelvis vattnets hårdhet och föroreningens karaktär. Användning av demineraliserat vatten eller avjoniserat vatten rekommenderas i allmänhet för att uppnå optimala resultat av rengöringen.

En dosering på 1–6 ml/l ger goda resultat med en tid på minst 5 minuter vid 50–65 °C. Vid svåra förhållanden kan upp till 10 ml/l användas. ProCare Med 10 MA bör idealt doseras vid en temperatur på 35–45 °C.

Genomför en mellanliggande sköljning med vatten i minst 1 min efter rengöringsfasen. Vattnet kan doseras med ProCare Med 30 C om så önskas. Vidare information finns i bruksanvisningen till ProCare Med 30 C, om produkten ska användas.

En andra mellanliggande sköljning med demineraliserat vatten är obligatoriskt för oftalmologiska instrument.

För diskdesinfektorer från Miele och Steelco finns specifik information om fullständiga programcykler för olika medicinska specialiteter i respektive bruksanvisning.

Obs!

Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter. • Bearbetningen ska följa alla bestämmelser i enlighet med förordningarna om medicintekniska produkter och ska genomföras med validerade, lämpliga processer. • I enlighet med nationella riktlinjer och/eller EN ISO 15883 krävs en prestandakvalificering. • Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664. • Följ bruksanvisningarna till diskdesinfektorerna från Miele/Steelco. • För användning i diskdesinfektorer från andra tillverkare än Miele/Steelco hänvisas till bruksanvisningarna från respektive tillverkare.

ProCare

Med 10 MA

Milt alkaliskt allroundrengöringsmedel för automatiserad bearbetning

Tekniska uppgifter

Densitet (koncentrat): 1,1 g/ml.

pH-värde (1 % lösning i demineraliserat vatten): cirka 10,0.

Utseende (koncentrat): klart, gult.

Ingredienser

Ytaktiva ämnen, enzymer samt komplexbildare, hjälplösningsmedel, sekvestreringsmedel och konserveringsmedel.

Transport och förvaring

Transportera och förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Den här medicintekniska produkten är känslig för låga temperaturer. Om omgivningstemperaturen under transport sannolikt kommer att vara lägre än 5 °C måste produkten transporteras i temperaturreglerad lastbil/fraktcontainer över 5 °C, eller i skyddande omslag för transport och i en omgivningstemperatur som inte sjunker under -5 °C under längre än 10 timmar.

Information om kassering och återvinning

Behållare, skruvlock och etiketter är tillverkade av återvinningsbar polyeten. Lokala bestämmelser om avfall och avloppsvatten ska följas vid kassering av använda behållare, inklusive behållare med restprodukt och bearbetad lösning.

Information om kassering av oanvänd produkt finns i säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet finns i säkerhetsdatabladet.

CE-märkning

ProCare Med 10 MA uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

Kontaktuppgifter

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel.+46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Tillverkare

Schweiz
Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch