

ProCare

Med 10 PRE

Detergente respetuoso con el medioambiente para uso manual

Instrucciones de uso

Aplicación

ProCare Med 10 PRE es un detergente suave para el tratamiento manual exhaustivo de productos médicos reutilizables, termoestables, invasivos y no invasivos, como los instrumentos y utensilios quirúrgicos, los instrumentos MIC, los endoscopios rígidos, el material para anestesia, etc.

También es adecuado para poner a remojo los instrumentos antes del procesamiento automatizado y para reducir así el riesgo de la corrosión en los materiales y de que la suciedad se reseque sobre las superficies.

ProCare Med 10 PRE también es apto para su uso en baños de ultrasonidos.

Propiedades

Gracias a la combinación óptima de tensioactivos, ProCare Med 10 PRE ofrece las siguientes propiedades:

- Valor pH neutro.
- Amplia gama de compatibilidad de materiales.
- Basado en una fórmula sin NTA ni fosfatos.
- Excelente biodegradabilidad.

Compatibilidad con materiales

Compatible con acero inoxidable, aluminio (anodizado), metales no ferrosos, PVC, caucho, materiales plásticos y cerámicos.

Para los materiales que no se hayan mencionado anteriormente, póngase en contacto con su delegado comercial quien le indicará si el producto es adecuado o no.

Dosificación y aplicación

Aplicación	Dosificación	Comentarios
(Pre)limpieza manual de productos médicos	0.5-1.0 %	Sumerja los instrumentos durante 2-15 min; en caso necesario, cepíllelos. Use la solución tan solo una vez.
Limpieza ultrasónica	0.5-1.0 %	Aprox. 5 min de sonicación.
Remojo de instrumentos antes de la limpieza automatizada.	0.2-0.5 %	Use la solución tan solo una vez.

Aclarar los instrumentos con agua después de la limpieza o antes de introducirlos en la lavadora desinfectadora.

Tenga en cuenta lo siguiente

No mezclar con otros productos. • Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Miele/Steelco a la hora de cambiar productos. • El procesado debe cumplir todas las disposiciones en virtud de la normativa de dispositivos médicos y deberán llevarse a cabo mediante procesos apropiados y validados. • Seguir las recomendaciones sobre el tratamiento posterior emitido por los fabricantes del instrumental que exige la norma ISO 17664.

ProCare

Med 10 PRE

Detergente respetuoso con el medioambiente para uso manual

Ficha técnica

Densidad (concentrado): 1.1 g/mL

Valor pH (solución al 1 % en agua desmineralizada): aprox. 7.5

Aspecto (concentrado): transparente, desde incoloro hasta amarillento

Ingredientes

Agentes tensioactivos, agentes complejos, inhibidores de la corrosión

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C.

Este producto médico es sensible a las bajas temperaturas. Si es posible que la temperatura ambiente durante el transporte baje de los 5 °C, el producto deberá enviarse utilizando un contenedor para camión o un contenedor marítimo con control de temperatura por encima de los 5 °C. También se podrá transportar utilizando cubiertas de protección para el transporte que garanticen que la temperatura ambiente no caiga por debajo de los menos 5 °C durante más de 10 horas.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los envases, los tapones de rosca y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Para la eliminación de envases utilizados, incluidos los que contengan producto residual y solución procesada, se deben seguir las directrices locales sobre residuos y sobre aguas residuales.

Para obtener información sobre la eliminación de un producto sin utilizar, consulte la ficha técnica de seguridad.

Información sobre seguridad

Para obtener información sobre seguridad laboral, consulte la ficha técnica de seguridad.

Marcado CE

ProCare Med 10 PRE cumple con los requisitos para los productos sanitarios en conformidad con el Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, consulte a su representante.

Información de contacto

Alemania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
Fax +34 916620266
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante

Suiza

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch