

ProCare

Med 30 P

Środek neutralizujący na bazie kwasu nieorganicznego

Instrukcja użytkowania

Zastosowanie

ProCare Med 30 P to kwasowy środek neutralizujący do myjni-dezynfektorów do zastosowania po maszynowym myciu o zasadowym odczynie termostabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, inwazyjnych i nieinwazyjnych, takich jak narzędzia chirurgiczne i sprzęt.

Właściwości

ProCare Med 30 P to kwasowy środek neutralizujący, posiadający poniższe właściwości:

- Łagodnie usuwa osady zasadowe z przedmiotów poddawanych obróbce
- Może przedłużyć żywotność narzędzi, zapobiegając powstawaniu plam na przedmiotach mytych detergentami zasadowymi, które mogłyby spowodować nieodwracalne uszkodzenie materiałów w późniejszym cyklu przygotowania do użytku, np. podczas sterylizacji
- Wolny od środków powierzchniowo czynnych

Zgodność materiałowa

Nadaje się do stali nierdzewnej, tworzywa sztucznych, szkła i ceramiki. Nie jest zgodny z (anodowanym) aluminium i cynkiem.

W przypadku materiałów niewymienionych powyżej prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu ustalenia, czy materiał jest odpowiedni.

Dozowanie i użycie

Optymalne dawkowanie zależy głównie od ilości osadów zasadowych. Zapewnić całkowite spuszczenie płynu myjącego przed neutralizacją.

W praktyce faza neutralizacji z dozowaniem od 1 do 3 mL/L zapewnia dobre wyniki po upływie co najmniej 1 minuty od czyszczenia przy użyciu ProCare Med 10 A. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkowania ProCare Med 10 A.

Zapewnić prawidłowe płukanie pośrednie po fazie neutralizacji przy użyciu ProCare Med 30 P przez co najmniej 1 minutę, aby upewnić się, że na elementach poddawanych obróbce nie pozostały żadne ślady oraz dla uniknięcia korozji.

W przypadku myjni-dezynfektorów Miele i Steelco szczegółowe informacje na temat pełnych cykli programu są podane dla różnych dyscyplin medycznych w odpowiednich instrukcjach użytkowania.

Uwaga!

Do przygotowania materiałów anestetycznych i narzędzi okulistycznych do ponownego użycia zaleca się stosowanie ProCare Med 30 C.

- Nie mieszać z innymi produktami!
- W przypadku zmiany produktów należy skontaktować się z serwisem Miele/Steelco.
- Przygotowanie do użycia powinno być zgodne ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz wykonywane przy użyciu odpowiednich, zatwierdzonych procesów.
- Zgodnie z wytycznymi krajowymi i/lub normą EN ISO 15883 konieczna jest ocena skuteczności działania.
- Należy postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie dekontaminacji wydanymi przez producentów narzędzi z uwzględnieniem przepisów ISO 17664.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi myjni-dezynfektorów Miele/Steelco.
- W przypadku stosowania w myjniach-dezynfektorach innych niż dostarczane przez Miele/Steelco, należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i zaleceniami odpowiedniego producenta.

ProCare

Med 30 P

Środek neutralizujący na bazie kwasu nieorganicznego

Dane techniczne

Gęstość (koncentrat): 1.1 g/mL

Wartość pH (1% roztwór w wodzie demineralizowanej): ok. 2.3

Wygląd (koncentrat): przezroczysty, bezbarwny

Skład

Kwas nieorganiczny

Transport i przechowywanie

Przechowywać produkt w temperaturze od 5°C do 25°C.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Pojemniki, nakrętki i etykiety zostały wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu. Przy utylizacji zużytych pojemników, w tym pojemników z pozostałościami produktu i przetworzonym roztworem, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i ścieków.

Informacje dotyczące utylizacji niewykorzystanego produktu dostępne są w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy dostępne są w karcie charakterystyki.

Oznaczenie CE

ProCare Med 30 P spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Dostępność

Zapytaj lokalnego przedstawiciela o obecne wymiary pojemników.

Dane kontaktowe

Niemcy

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
Fax +48 22 548-4010
info@miele.pl
www.miele.pl/professional

Włochy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Producent

Szwajcaria

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch