

## ProCare Med 10 BPD



### Kalkbinder

#### Anvendelse:

Flydende koncentrat, surt, på basis af organiske syrer. Til maskinel genbehandling af bækkenere og urinflasker i Miele Professional bækkenskyllere.

*ProCare Med 10 BPD* forhindrer kalkaflejringer i dampgeneratorer, rørledninger og dyser. Ved genstridige tilsmudsninger anbefales desuden brug af rengøringsmidlet *ProCare Med 10 BPA*.

#### Kvalitetsstandard:

*ProCare Med 10 BPD* overholder kravene i lovgivningen om medicinsk udstyr. **CE**

#### Produktegenskaber:

- Kan også anvendes ved høj vandhårdhed

*ProCare Med 10 BPD* er kun beregnet til professionel brug.


#### Anvendelse og dosering:

Kalkbinder *ProCare Med 10 BPD* og bækkenskyllerne PWD 8541, PWD 8545, PWD 8546, PWD 8549 er perfekt afstemt efter hinanden.

- Præcis og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Dosering: 0,5 - 1,5 ml/l afhængigt af vandhårdhed
- Kort, Standard, Intensiv og brugerprogrammer.
- Kontrollerer bækkenskyllersens og doseringssystemets syrebestandighed.

#### Programforløb:

Ved standardprogrammet til PWD 8545 som eksempel.

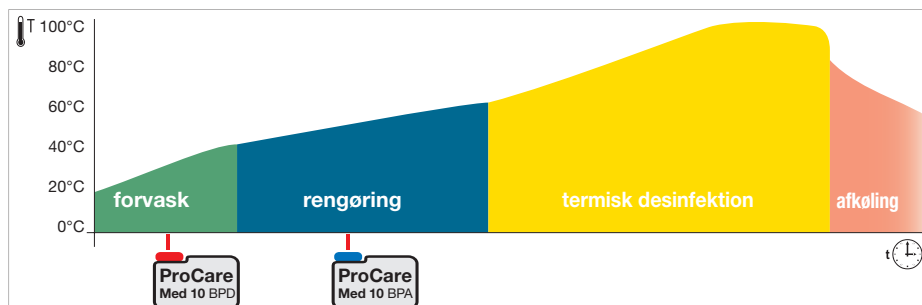

#### Bemærk!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Genbehandlingen skal udføres med egnede procedurer i overensstemmelse med anbefalingen fra KRINKO<sup>1</sup> og BfArM<sup>2</sup> samt Medizinprodukte-Betreiberverordnung.
- Følg anbefalingerne for genbehandling fra producenten af det medicinske udstyr iht. DIN EN ISO 17664.
- Brugsanvisningerne til Miele Professional bækkenskyllere skal overholdes.

<sup>1</sup>Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention og <sup>2</sup>Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

## ProCare Med 10 BPD



### Kalkbinder

#### Tekniske data:

- Densitet (20 °C): ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi (målt i AD-vand, 20 °C) 0,5 - 1,5 ml/l: ca. 3,7 - 3,0

#### Indholdsstoffer i rengøringsmidler iht. EF-forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004:

- < 5 % polycarboxylater
- Konserveringsmiddel  
(kaliumsorbat, methylchloroisothiazolinon/methylisothiazolinon)

#### Opbevaring:

- Opbevaringstemperatur: 0 - 30 °C
- Holdbar i 3 år ved korrekt opbevaring
- Udløbsdato: Se påtrykning på etiketten efter symbolet 

#### Fare- og sikkerhedsanvisninger:

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af indholdsrester: Se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg. En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

#### Emballagestørrelser

| Betegnelse         | Beholder      | Materialenummer |
|--------------------|---------------|-----------------|
| ProCare Med 10 BPD | 5-liters dunk | 11233190        |
| Åbner til dunk     | til 5 l       | 9066810         |

#### Kontaktoplysninger:

##### Tyskland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Tlf. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Luxemburg

Miele S.à.r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Tlf. +352 (0) 4971125  
infolux@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

##### Importør til Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4,  
8957 Spreitenbach  
Tlf. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Østrig

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Tlf. +43 (0) 50800420  
vertrieb-professional@miele.at

##### Danmark

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
Tlf. +45 43271510  
professional@miele.dk  
www.miele.dk/professional  
www.miele.at/professional



##### Tyskland

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de