

ProCare

Med 40

Additivo brillantante biocompatibile

Istruzioni d'uso

Applicazione

ProCare 40 è un additivo brillantante e asciugante, dosato nell'acqua di risciacquo finale nei termodisinfettatori per dispositivi medici termostabili e termolabili riutilizzabili, invasivi e non-invasivi, come strumenti chirurgici, microchirurgici e MIS, utensili e termodisinfettanti ad ampia camera Steelco per letti ospedalieri ecc.

Proprietà

ProCare Med 40 è un brillantante avente le seguenti proprietà:

- Riduce la tensione superficiale dell'acqua
- Riduce le striature causate dall'acqua sugli oggetti
- Riduce notevolmente i tempi di asciugatura
- Biocompatibilità approvata
- pH neutro

Compatibilità dei materiali

Adatto ad acciaio inossidabile, alluminio (anodizzato), metalli non ferrosi, PVC, gomma, materie plastiche, ceramica. Per dispositivi e componenti in polisulfone (PSU) e polifenil-sulfone (PPSU), PVC, gomma, potrebbero verificarsi crepe da sollecitazioni. È obbligatorio eseguire opportuni test di idoneità prima dell'uso.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

Dosaggio e applicazione

A seconda della qualità dell'acqua, un dosaggio compreso tra 0,3 e 1,0 mL/L garantisce ottimi risultati. È opportuno utilizzare sempre acqua demineralizzata/osmotizzata per disinfezione termica o termochimica/(risciacquo finale). La temperatura minima di dosaggio è di 40 °C.

Per termodisinfettanti Miele e Steelco vengono fornite informazioni specifiche riguardo a cicli di programmi completi per diverse discipline mediche nelle rispettive istruzioni d'uso.

Attenzione!

Non idoneo per utensili per anestesia. • Non miscelare con altri prodotti! • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Il trattamento deve essere conforme a tutte le ordinanze previste dai regolamenti sui dispositivi medici e deve essere eseguito tramite idonei processi validati. • In conformità con le linee guida nazionali e/o la norma EN ISO 15883, è necessaria una qualificazione delle prestazioni. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione in relazione alle disposizioni della norma ISO 17664. • Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sui termodisinfettatori Miele/Steelco. • Per l'utilizzo in termodisinfettatori diversi da quelli forniti da Miele/Steelco, rivolgersi al produttore del termodisinfettatore in questione e attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.

ProCare

Med 40

Additivo brillantante biocompatibile

Dati tecnici

Densità (concentrato): 1,0 g/mL

Valore di pH (soluzione all'1% in acqua demineralizzata): circa 7.9

Aspetto (concentrato): trasparente, da incolore a giallo

Componenti

Tensioattivi, acidi organici, conservanti

Trasporto e conservazione

Conservare il prodotto il presente prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

Il presente dispositivo medico è sensibile alle temperature fredde. Se si prevede che la temperatura ambiente di trasporto sia inferiore a 5 °C, il presente prodotto deve essere spedito in camion/container marittimo a temperatura controllata superiore a 5 °C o utilizzando coperture protettive per il trasporto in caso di temperatura ambiente non inferiore a -5 °C per più di 10 ore.

Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio

I contenitori, i tappi a vite e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile. Per lo smaltimento dei contenitori usati, inclusi quelli contenenti residui di prodotto e soluzione trattata, attenersi ai regolamenti locali sullo smaltimento di rifiuti e acque reflue.

Per lo smaltimento di prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Marcatura CE

ProCare Med 40 è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

Disponibilità

Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

Dati di contatto**Germania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H
Strada di Circonvallazione, 27
39057 San Michele Appiano (BZ)
Tel. +39 0471 666319
Fax +39 0471 666350
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional
www.miele.it/de/professional

Italy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Produttore**Svizzera**

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch