

ProCare

Med 13 PRE

Licht alkalisch, enzymatisch voorbehandelings-schuim

Gebruiksaanwijzingen

Toepassing

ProCare Med 13 PRE is een gebruiksklaar mild alkalisch enzymatisch reinigingsschuim op basis van een speciale combinatie van enzymen en oppervlakte-actieve stoffen om herbruikbare, invasieve en niet-invasieve, thermostabiele en thermolabele medische hulpmiddelen besmet met bloed en organisch weefsel zoals chirurgische instrumenten en gebruiksvorwerpen, instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie, starre endoscopen en andere medische apparatuur vochtig te houden en om ze te beschermen tegen corrosie tijdens transport van het moment van gebruik tot de verwerkingsruimte.

Eigenschappen

Op basis van de speciale, enzymatische formule houdt ProCare Med 13 PRE instrumenten efficiënt vochtig en biedt het de volgende eigenschappen:

- Minimaliseert aanhechting van organisch chirurgisch vuil en maakt daardoor een eenvoudigere reiniging in het was- en desinfectieapparaat mogelijk
- Beschermt tegen corrosie
- Gemakkelijk af te spoelen zelfs bij omgevingstemperatuur
- Stabiel schuim
- Geschikt voor aluminium en geanodiseerd aluminium
- Veilig en duurzaam voor gebruiker en patiënt

Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor roestvrij staal, (geanodiseerd) aluminium, titanium en andere non-ferro metalen, verchroomde materialen, kunststoffen, elastomeren waaronder polyurethaan en siliconen, polytetrafluorethyleen (PTFE, bijv. Teflon), rubber en latex, glas en keramische materialen. Er is geen materiaal-incompatibiliteit bekend.

Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

Dosering en toepassing

ProCare Med 13 PRE is een gebruiksklare schuimspray die direct na gebruik op de verontreinigde voorwerpen kan worden aangebracht op het bevulde gebied van het medische hulpmiddel. Het moet zodanig worden gespoten dat een volledige dekking en bevochtiging van de instrumenten wordt gegarandeerd, om een optimale werkzaamheid te bereiken. Het afspoelen van het schuim voor verdere verwerking of voldoende voorspoelen in het was- en desinfectieapparaat draagt bij aan de stabiliteit van het mechanische behandelingsproces.

Houd rekening met het volgende!

Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • Neem de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met betrekking tot de bepalingen van ISO 17664 in acht.

ProCare

Med 13 PRE

Licht alkalisch, enzymatisch voorbehandelings-schuim

Technische gegevens

Dichtheid (gebruiksklare oplossing): 1,0 g/mL
pH-waarde (gebruiksklare oplossing): ca. 8,4
Uiterlijk (gebruiksklare oplossing): helder, kleurloos

Ingrediënten

Oppervlakte-actieve stoffen, enzymen, solubilisatoren, conserveermiddelen

Transport en opslag

Transporteer en bewaar dit product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C. Dit medisch hulpmiddel is gevoelig voor lage temperaturen. Als de omgevingstemperatuur van het transport waarschijnlijk lager is dan 5 °C, moet dit product worden vervoerd met een temperatuurgecontroleerde vrachtwagen/zeecontainer boven 5 °C, of met gebruik van beschermhoezen/kappen waarbij de omgevingstemperatuur niet langer dan 10 uur onder minus 5 °C komt.

Informatie over verwijdering en recycling

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing, dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.

CE-markering

ProCare Med 13 PRE voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

Contactgegevens

Duitsland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Tel.+31 347 378-884
Fax+31 347 378-429
professional@miele.nl
serviceprofessional@miele.nl
www.miele.nl/professional

Italië

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabrikant

Zwitserland

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch