

ProCare

Med 30 C

Agente neutralizzante a base di acido organico

Istruzioni d'uso

Applicazione

ProCare Med 30 C è un neutralizzante acido per termodisinfettatori dopo la pulizia automatizzata leggermente alcalina di dispositivi medici termostabili e termolabili riutilizzabili, invasivi e non-invasivi, come strumenti chirurgici, microchirurgici e MIS, endoscopi rigidi, apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare, utensili infermieristici, contenitori in alluminio per sterilizzazione e altre attrezzature mediche.

Proprietà

ProCare Med 30 C è un neutralizzante leggermente acido avente le seguenti proprietà:

- Rimuove delicatamente i residui alcalini dagli oggetti trattati
- È in grado di prolungare la durata di vita degli strumenti prevenendo la formazione di macchie sugli oggetti ricondizionati con detergenti alcalini che potrebbero causare danni irreversibili ai materiali nel successivo ciclo di trattamento, ad esempio durante la sterilizzazione
- Adatto a materiali per anestesia
- Compatibile con l'alluminio
- Privo di tensioattivi
- Privo di fosfati

Compatibilità dei materiali

Adatto ad acciaio inossidabile, alluminio (anodizzato), materie plastiche, gomma, vetro e ceramica.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

Dosaggio e applicazione

Il dosaggio ottimale dipende principalmente dalla quantità di residui alcalini. Assicurare il drenaggio completo del liquore di lavaggio prima della neutralizzazione.

In pratica, una fase di neutralizzazione con un dosaggio compreso tra 1 e 3 mL/L offre ottimi risultati con un trattamento di almeno 1 minuto dopo la pulizia con detergenti alcalini quali ProCare Med 10 MA. Attenersi alle istruzioni d'uso di ProCare Med 10 MA per ulteriori dettagli.

Effettuare un idoneo risciacquo intermedio dopo la fase di neutralizzazione con ProCare Med 30 C per almeno 1 minuto per garantire l'assenza di segni sugli oggetti trattati ed evitare la corrosione.

Per termodisinfettanti Miele e Steelco vengono fornite informazioni specifiche riguardo a cicli di programmi completi per diverse discipline mediche nelle rispettive istruzioni d'uso.

Attenzione!

Non miscelare con altri prodotti. • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Il trattamento deve essere conforme a tutte le ordinanze previste dai regolamenti sui dispositivi medici e deve essere eseguito tramite idonei processi validati. • In conformità con le linee guida nazionali e/o la norma EN ISO 15883, è necessaria una qualificazione delle prestazioni. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione in relazione alle disposizioni della norma ISO 17664. • Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sui termodisinfettatori Miele/Steelco. • Per l'utilizzo in termodisinfettatori diversi da quelli forniti da Miele/Steelco, rivolgersi al produttore del termodisinfettatore in questione e attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.

ProCare

Med 30 C

Agente neutralizzante a base di acido organico

Dati tecnici

Densità (concentrato): 1,2 g/mL

Valore di pH (soluzione all'1% in acqua demineralizzata): circa 2.6

Aspetto (concentrato): trasparente, incolore

Componenti

Acido organico

Trasporto e conservazione

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio

I contenitori, i tappi a vite e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile. Per lo smaltimento dei contenitori usati, inclusi quelli contenenti residui di prodotto e soluzione trattata, attenersi ai regolamenti locali sullo smaltimento di rifiuti e acque reflue.

Per lo smaltimento di prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Marcatura CE

ProCare Med 30 C è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

Disponibilità

Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

Dati di contatto**Germania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H
Strada di Circonvallazione, 27
39057 San Michele Appiano (BZ)
Tel. +39 0471 666319
Fax +39 0471 666350
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional
www.miele.it/de/professional

Italy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Produttore**Svizzera**

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch