

ProCare

Med 64 LUB

Smøremiddel for manuelle applikasjoner

Bruksanvisning

Bruksområde

ProCare Med 64 LUB er et høykvalitetsprodukt til instrumentvedlikehold i sprayform som er utformet for manuelt vedlikehold av gjenbrukbare, invasive og ikke-invasive, termostabile medisinske enheter, for eksempel kirurgiske instrumenter med bevegelige deler som ledd, hengsler, gjenger, lukkemekanismer og andre glidende overflater som klemmer, tener, sakser, hullmaskiner, nåleholdere, retraktorer, ligatorer osv. Det benyttes etter grundig rengjøring og desinfisering og før dampsterilisering.

Egenskaper

ProCare Med 64 LUB er et manuelt instrumentsmøremiddel med følgende egenskaper:

- Basert utelukkende på hvit olje av medisinsk kvalitet
- Fri for enhver type potensielt allergene tilsetningsstoffer
- Etterlater en tynn hinne på behandlede overflater for å forhindre friksjon mellom metallflater
- Forhindrer friksjon mellom metallflater ved effektivt å beskytte hengslede instrumenter mot gnissing, korrosjon, rust, misfarging, flekker og prematur instrumentslitasje.
- Påvist dampgjennomtrengelighet
- Kompatibel med dampsterilisering
- Toksikologisk sikker i henhold til forskrifter for legemidler og matvarer
- Spraytilbehør som kan justeres til ønsket lengde

Materialkompatibilitet

Egnet for alle metaller som normalt benyttes i medisinsk utstyr. Det kan finnes inkompatibilitet med polymere avhengig av polymertypen.

For materialer som ikke er nevnt ovenfor, ta kontakt med din lokale representant for å fastslå om materialet er egnet.

Dosering og bruk

For optimal instrumentvedlikehold bør instrumentene kjøles ned til romtemperatur etter grundig rengjøring, desinfisering og tørking før bruk for å unngå metallslitasje og overflate-skader. Instrumentene må være helt tørre før bruk av ProCare Med 64 LUB.

Spray ledd, hengsler, glidende overflater, gjenger og andre bevegelige deler med ProCare Med 64 LUB raskt og selektivt fra kortest mulig avstand ved bruk av det medfølgende spraytilbehøret. Hold sprayflasken loddrett når du sprayer. Påfølgende bevegelse av de bevegelige delene gjør at smøremidlet spres ytterligere. Overflødig olje må fjernes før sterilisering med et nytt, rent håndkle.

OBS!

Må ikke blandes med andre produkter! • Ring serviceavdelingen hos Miele/Steelco for erstatning av produkter. • Følg anbefalingene om gjenbehandling fra instrumentprodusentene med hensyn til bestemmelsene i ISO 17664.

ProCare

Med 64 LUB

Smøremiddel for manuelle applikasjoner

Tekniske data

Tetthet: 0,9 g/ml
pH-verdi: nøytral
Utseende: fargeløs

Innholdsstoffer

Medisinsk hvit olje (Phram. Eur.), drivstoff (propan, butan)

Transport og oppbevaring

Oppbevar produktet ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C.
Beskytt produktet mot direkte sollys og hold unna varme- og antenningskilder.

Informasjon om kassering og resirkulering

Boksen består av resirkulerbart aluminium. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering ved kassering av tomme bokser.

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsdatabladet for informasjon om sikkerhet på arbeidsplassen og riktig kassering av ubrukt produkt.

Unngå aerosoldannelse og inhalering av aerosoler.

CE-merking

ProCare Med 64 LUB oppfyller kravene til medisinsk utstyr i henhold til forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

Tilgjengelighet

Spør din lokale representant om gjeldende beholderstørrelser.

Kontaktopplysninger**Tyskland**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Tel.+47 6717-3100
Fax+47 6717-3110
professional@miele.no
www.miele.no/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Produsent**Sveits**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch