

Producto neutralizante

Utilización:

Concentrado líquido, ácido, a base de ácidos cítricos. Para la preparación a máquina de instrumental dental, incluyendo el instrumental de transmisión en lavadoras desinfectadoras de Miele Professional.

Se recomienda el uso de *ProCare Dent 30 C* sobre todo para los casos en los que el instrumental no se puede preparar con un producto neutralizante de ácidos fosfóricos (p. ej., instrumental de transmisión).

Características de calidad:

ProCare Dent 30 C cumple con las indicaciones resultantes de la legislación europea sobre productos sanitarios. **CE MD**

Si se produce un incidente grave con este producto, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Características del producto:


- Buena compatibilidad con los materiales.
- No contiene tensioactivos.

Aplicación y dosificación:

ProCare Dent 30 C se adapta a las secuencias de proceso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora.
- Para la dosificación deben utilizarse aparatos de dosificación adecuados.
- Debe garantizarse que tanto la carga como las tuberías de desagüe son resistentes a los ácidos.
- Concentración de la aplicación: 1 ml/l
- Programa: Vario TD
- Temperatura mínima de dosificación: ≥ 15 °C

Desarrollo del programa:

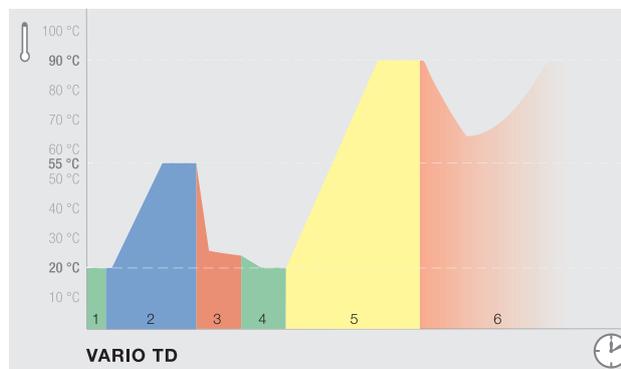

Desarrollo de procedimientos

Vario TD:

- 1 Prelavado**
Agua fría (descalcificada), sin calentamiento
- 2 Limpieza**
Agua fría/caliente (descalcificada), con calentamiento, con detergentes alcalinos
- 3 Neutralización**
Agua fría/agua caliente (descalcificada), sin calentamiento, con *ProCare Dent 30 C*
- 4 Aclarado intermedio**
Agua fría/agua caliente (descalcificada), sin calentamiento
- 5 Desinfección térmica**
a > 90 °C durante 5 minutos de tiempo de mantenimiento en el último aclarado
- 6 Secar**

La solución de aplicación debe aclararse completamente con agua. En el caso de las lavadoras desinfectadoras de Miele Professional, esto queda garantizado si se utiliza correctamente el programa Vario TD (por ejemplo, la clasificación correcta de los utensilios de lavado). Durante la puesta en funcionamiento o el mantenimiento rutinario de la lavadora desinfectadora se realiza una verificación midiendo el aumento de conductancia en el último aclarado.

Se recomienda el uso de agua completamente desmineralizada en el aclarado final para evitar la formación de depósitos y manchas de agua y para proteger el aluminio anodizado.

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes del cambio de producto hay que enjuagar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- La preparación debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, utilizando procedimientos adecuados y validados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de preparación del fabricante del dispositivo médico de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- Se deben respetar las instrucciones de uso de las lavadoras desinfectadoras de Miele Professional.
- Solo para uso industrial.

Producto neutralizante

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): aprox. 1,2 g/cm³
- Valor pH (Determinado con agua completamente desmineralizada, 20 °C) 1 ml/l: aprox. 3,0

Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- Producto conservante (2-octil-2 H-isotiazol-3-ona)

Indicaciones de almacenamiento:

- Temperatura de almacenaje: -3 °C hasta 30 °C
- Caduca a los 3 años con almacenaje correcto.
- Usar no más tarde de: ver impresión en la etiqueta detrás del símbolo 

Pueden producirse variaciones de color durante el almacenamiento en los envases originalmente precintados. Esto no afecta las propiedades técnicas de aplicación.

Advertencias de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Los datos de la ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias. De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Envases suministrables y accesorios:

Denominación	Envase
<i>ProCare Dent 30 C</i>	Garrafa de 5 l
Llave para garrafa	para garrafas de 5, 10 y 20 l
Bandeja colectora DTD 2	Para garrafas de 5 y 10 l

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburgo
www.drweigert.de