

## ProCare Dent 40

## Naspoelmiddel

### Gebruik:

Vloeibaar concentraat. Voor de automatische instrumentenbehandeling van tandheelkundige instrumenten, inclusief transmissie-instrumenten in thermodesinfectoren van Miele Professional.

### Kwaliteitskenmerken:

*ProCare Dent 40* voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen. **CE MD**

Als zich een ernstig incident voordoet met het product, meld dit dan aan de fabrikant en de relevante nationale autoriteit.

### Producteigenschappen:


- Verbetert en versnelt het drogen van tandheelkundige instrumenten bij de machinale instrumentenbehandeling.
- Neutraliseert alkalische overdracht en alkaliteit.

### Gebruik en dosering:

*ProCare Dent 40* is geformuleerd voor gebruik in processen in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Er moeten geschikte doseerdispensers worden gebruikt.
- Gebruiksconcentratie: 0,3 ml/l via deurdispenser voor naspoelmiddelen
- Programmakeuze: Vario TD
- Minimum doseertemperatuur:  $\geq 70^{\circ}\text{C}$

### Programmaverloop:

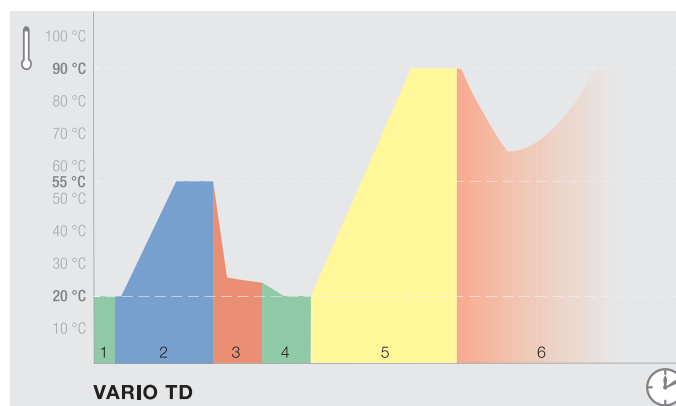

#### Vario TD-proces:

- 1 Voorspoelen**  
Koud water (onthard), geen verwarming
- 2 Hoofdreinigingsfase**  
Koud/heet water (onthard), met verwarming, met proceschemicaliën
- 3 Neutralisatie**  
Koud/heet water (onthard), geen verwarming, met proceschemicaliën
- 4 Tussentijdse spoelcyclus**  
Koud/heet water (onthard), geen verwarming
- 5 Thermische desinfectie**  
bij  $> 90^{\circ}\text{C}$  met 5 minuten houdtijd tijdens het naspoelen met *ProCare Dent 40*
- 6 Drogen**

Miele adviseert het gebruik van gedemineraliseerd water in de naspoeling om het spoelgoed en de thermodesinfector te beschermen tegen vlekken en aanslag en om geanodiseerd aluminium te beschermen.

### Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de watertoevoerslangen, met water voordat u van product wisselt.
- De behandeling moet voldoen aan alle verordeningen volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen en moet worden uitgevoerd met geschikte gevalideerde processen.
- Volg de aanbevelingen voor behandeling op van fabrikanten van medische hulpmiddelen met betrekking tot de bepalingen van DIN EN ISO 17664.
- Gebruiksaanwijzingen voor thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor commercieel gebruik.

## ProCare Dent 40

### Naspoelmiddel

#### Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 0,3 ml/l: ca. 3,8

#### Inhoudsstoffen volgens de Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- < 5% fosfonaten
- 15% tot 30% niet-ionische tensiden
- Daarnaast conserveringsmiddelen (methylchlorisothiazolinone, methylisothiazolinone)

#### Opslaginstructies:

- Opslagtemperatuur: 0 °C tot 30 °C
- Kan 3 jaar gebruikt worden onder de juiste opslagomstandigheden.
- Houdbaarheidsdatum: zie etiket naast zandlopersymbool 

#### Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze leeg en verzegeld zijn. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Alle informatie hierin is actueel en voor zover wij weten correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen proeven en experimenten uit te voeren. Dit kan niet worden beschouwd als een wettelijke garantie van productkenmerken of -eigenschappen.

#### Verpakkingseenheid:

| Aanduiding      | Verpakkingseenheid |
|-----------------|--------------------|
| ProCare Dent 40 | 1 l fles           |

#### Contactinformatie:

##### Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 800 22 44 644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN  
NIEDERLANDE  
Tel. +31 347 378-9111  
info@miele.nl  
www.miele.nl

##### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 MOLLEM  
BELGIEN  
Tel. +32 2 4511-411  
info@miele.be  
www.miele.be



##### Duitsland

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg, Duitsland  
www.drweigert.com