

ProCare

Med 40

Biokompatibelt sköljmedel

Bruksanvisning

Användning

ProCare 40 är ett skölj- och torkmedel som doseras i det sista sköljvattnet i diskdesinfektorer för återanvändbara, invasiva och icke-invasiva, värmestabila och värmekänsliga medicintekniska produkter som exempelvis kirurgiska instrument, mikrokirurgiska och MIS-instrument och redskap, samt i stora diskdesinfektorer från Steelco som används för sjukhussängar osv.

Egenskaper

ProCare Med 40 är ett sköljmedel med följande egenskaper:

- Minskar vattnets ytspänning.
- Minskar mängden märken av vattenstrimmor på objekt.
- Förkortar torktiden väsentligt.
- Godkänd biokompatibilitet
- pH-neutralt.

Materialkompatibilitet

Lämpligt för rostfritt stål, (anodiserat) aluminium, icke-järnmetaller, PVC, gummi, plastmaterial och keramik. För produkter och komponenter tillverkade av polysulfon (PSU), polyfenylsulfon (PPSU), PVC eller gummi kan spänningssprickbildning förekomma. Lämplighetstest för överensstämmelse måste genomföras före användning.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

Dosering och användning

En dosering på 0,3–1,0 ml/l ger goda resultat, beroende på vattenkvaliteten. Avjoniserat vatten ska alltid användas för termisk och kemotermisk desinfektion (sista sköljning). Lägst doseringstemperatur är 40 °C.

För diskdesinfektorer från Miele och Steelco finns specifik information om fullständiga programcykler för olika medicinska specialiteter i respektive bruksanvisning.

Obs!

Inte lämpligt för anesthesiutrustning. • Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter. • Bearbetningen ska följa alla bestämmelser i enlighet med förordningarna om medicintekniska produkter och ska genomföras med lämpliga validerade processer. • I enlighet med nationella riktlinjer och/eller EN ISO 15883 krävs en prestandakvalificering. • Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664. • Följ bruksanvisningarna till diskdesinfektorerna från Miele/Steelco. • För användning i diskdesinfektorer från andra tillverkare än Miele/Steelco hänvisas till bruksanvisningarna från respektive tillverkare.

ProCare

Med 40

Biokompatibelt sköljmedel

Tekniska uppgifter

Densitet (koncentrat): 1,0 g/ml.

pH-värde (1 % lösning i demineraliserat vatten): cirka 7,9.

Utseende (koncentrat): genomskinligt, färglöst till gult.

Ingredienser

Ytaktiva ämnen, organiska syror och konserveringsmedel.

Transport och förvaring

Transportera och förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Den här medicintekniska produkten är känslig för låga temperaturer. Om omgivningstemperaturen under transport sannolikt kommer att vara lägre än 5 °C måste produkten transporteras i temperaturreglerad lastbil/fraktcontainer över 5 °C, eller i skyddande omslag för transport och i en omgivningstemperatur som inte sjunker under -5 °C under längre än 10 timmar.

Information om kassering och återvinning

Behållare, skruvlock och etiketter är tillverkade av återvinningsbar polyeten. Lokala bestämmelser om avfall och avloppsvatten ska följas vid kassering av använda behållare, inklusive behållare med restprodukt och bearbetad lösning.

Information om kassering av oanvänd produkt finns i säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet finns i säkerhetsdatabladet.

CE-märkning

ProCare Med 40 uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

Kontaktuppgifter

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel. +46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Tillverkare

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch