

ProCare

Med 40

Abrillantador biocompatible

Instrucciones de uso

Aplicación

ProCare 40 es un abrillantador que se añade en el aclarado final de las lavadoras desinfectadoras para el tratamiento de productos sanitarios reutilizables, invasivos y no invasivos, termoestables y termolábiles, como instrumentañ y utensilios quirúrgicos, microquirúrgicos y MIC, así como lavadoras desinfectadoras Steelco de gran capacidad para el tratamiento de camas de hospital, etc.

Propiedades

ProCare Med 40 es un abrillantador que cuenta con las siguientes propiedades:

- Reduce tensión superficial del agua
- Reduce las marcas de agua en los productos
- Reduce significativamente el tiempo de secado
- Biocompatibilidad aprobada
- Valor pH neutro.

Compatibilidad con materiales

Compatible con acero inoxidable, aluminio (anodizado), metales no ferrosos, PVC, caucho, materiales plásticos y cerámicos. En los dispositivos y componentes hechos de polisulfona (PSU) y polifenilsulfona (PPSU), PVC o caucho puede producirse un agrietamiento por tensión. Se deberán llevar a cabo las pruebas de aptitud correspondientes antes de su uso.

Para los materiales que no se hayan mencionado anteriormente, póngase en contacto con su delegado comercial quien le indicará si es adecuado o no.

Dosificación y aplicación

En función de la calidad del agua, una dosificación de 0.3 a 1.0 mL/L garantizará unos buenos resultados. Se deberá utilizar siempre agua desionizada o agua de ósmosis inversa para la desinfección térmica o la desinfección termo-química (aclarado final). La temperatura de dosificación mínima es 40 °C.

En el caso de las lavadoras desinfectadoras Miele y Steelco, podrá consultar información específica sobre los ciclos del programa indicados para las distintas disciplinas médicas en sus instrucciones de uso correspondientes.

Tenga en cuenta lo siguiente

No es apto para utensilios de anestesia. • No mezclar con otros productos. • Llamar al servicio técnico de Miele/Steelco a la hora de cambiar productos. • El procesado debe cumplir todas las disposiciones en virtud de la normativa de dispositivos médicos y deberá llevarse a cabo mediante procesos apropiados y validados. • De acuerdo con las normativas nacionales o con la norma EN ISO 15883, se deberá llevar a cabo una cualificación del rendimiento. • Seguir las recomendaciones sobre el tratamiento posterior emitido por los fabricantes del instrumental en relación con las disposiciones de la norma ISO 17664. • Se deben seguir las instrucciones operativas relacionadas con las lavadoras desinfectadoras Miele/Steelco. • Si se va a utilizar en lavadoras desinfectadoras que no sean de la marca Miele/Steelco, consulte al fabricante de la lavadora desinfectadora y sus instrucciones de uso.

ProCare

Med 40

Abrillantador biocompatible

Ficha técnica

Densidad (concentrado): 1.0 g/mL

Valor pH (solución al 1 % en agua desmineralizada): aprox. 7.9

Aspecto (concentrado): transparente, desde incoloro hasta amarillento

Ingredientes

Tensioactivos, ácidos orgánicos, conservantes

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C.

Este producto sanitario es sensible a las bajas temperaturas. Si es posible que la temperatura ambiente durante el transporte baje de los 5 °C, el producto deberá enviarse utilizando un contenedor para camión o un contenedor marítimo con control de temperatura por encima de los 5 °C. También se podrá transportar utilizando cubiertas de protección para el transporte que garanticen que la temperatura ambiente no caiga por debajo de los menos 5 °C durante más de 10 horas.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los envases, los tapones de rosca y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Para la eliminación de envases utilizados, incluidos los que contengan producto residual y solución procesada, se deben seguir las directrices locales sobre residuos y sobre aguas residuales.

Para obtener información sobre la eliminación de un producto sin utilizar, consulte la ficha técnica de seguridad.

Información sobre seguridad

Para obtener información sobre seguridad laboral, consulte la ficha técnica de seguridad.

Marcado CE

ProCare Med 40 cumple con los requisitos para los productos sanitarios en conformidad con el Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, consulte a su representante.

Información de contacto

Alemania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
Fax +34 916620266
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante

Suiza

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch