

ProCare

Med 64 LUB

Lubricante para aplicación manual

Instrucciones de uso

Aplicación

ProCare Med 64 LUB es un producto en aerosol de aplicación manual para el mantenimiento de productos sanitarios de alta calidad, reutilizables, invasivos y no invasivos y termoestables, como instrumental quirúrgico con partes móviles como uniones, articulaciones, hilos, cierres y otras superficies deslizantes como pinzas, fórceps, tijeras, punzones, portaguñas, separadores, elementos de ligadura, etc. Este producto debe utilizarse tras una limpieza y desinfección exhaustivas y antes de llevar a cabo una esterilización mediante vapor.

Propiedades

ProCare Med 64 LUB es un lubricante para aplicación manual que cuenta con las siguientes propiedades:

- Se compone exclusivamente de aceite blanco de uso médico
- Libre de cualquier aditivo potencialmente alérgico
- Deja una película fina en las superficies tratadas para evitar la fricción de metal con metal
- Evita la fricción metal con metal de forma eficaz protegiendo los instrumentos articulados de la corrosión por rozamiento, el óxido, la pérdida de brillo y las manchas, así como del desgaste prematuro del instrumental.
- Permeabilidad al vapor comprobada
- Compatible con esterilización mediante vapor
- Libre de agentes tóxicos, de acuerdo con lo establecido en la legislación de los sectores farmacéutico y alimentario
- Boquillas ajustables a cualquier longitud

Compatibilidad con materiales

Compatible con todos los metales de uso habitual en los dispositivos médicos. Puede haber incompatibilidades con los polímeros en función del tipo de polímero.

Para los materiales que no se hayan mencionado anteriormente, póngase en contacto con su delegado comercial quien le indicará si es apto o no.

Dosificación y aplicación

Para un cuidado óptimo del instrumental y tras una limpieza, una desinfección y un secado exhaustivos, el instrumental deberá enfriarse a temperatura ambiente antes de la aplicación del producto con el fin de evitar la abrasión del metal y los daños en la superficie. El instrumental deberá secarse por completo antes de la aplicación de ProCare Med 64 LUB. Mediante la boquilla suministrada, pulverice las uniones, las articulaciones, las superficies deslizantes, los hilos y otras piezas móviles con ProCare Med 64 LUB de manera selectiva y a una distancia lo más corta posible. Mantenga el pulverizador en posición vertical durante su uso. Mueva las piezas móviles a continuación para favorecer la distribución del lubricante. Elimine el exceso de aceite con un paño nuevo y limpio antes de proceder con la esterilización.

Tenga en cuenta lo siguiente

No mezclar con otros productos. • Llamar al servicio técnico de Miele/Steelco a la hora de cambiar productos. • Seguir las recomendaciones sobre el tratamiento posterior emitido por los fabricantes del instrumental en relación con las disposiciones de la norma ISO 17664.

ProCare

Med 64 LUB

Lubricante para aplicación manual

Ficha técnica

Densidad: 0.9 g/mL

Valor de pH: neutro

Aspecto: incoloro

Ingredientes

Aceite blanco de uso médico (Ph. Eur.), gas propulsor (propano, butano)

Transporte y almacenamiento

Almacene el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C.

Mantenga el producto alejado de la luz solar directa y de las fuentes de calor o ignición.

Información sobre eliminación y reciclaje

El bote está fabricado con aluminio reciclable. Elimine los envases vacíos siguiendo las indicaciones de la legislación local al respecto.

Información sobre seguridad

Para obtener información sobre seguridad laboral y sobre la correcta eliminación de un producto sin utilizar, consulte la ficha técnica de seguridad.

Trate de evitar la generación de aerosoles; no inhale aerosoles.

Marcado CE

ProCare Med 64 LUB cumple con los requisitos para los productos sanitarios en conformidad con el Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, consulte a su representante.

Información de contacto**Alemania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
Fax +34 916620266
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante**Suiza**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch