



Reiniging en desinfectie van instrumenten in de Miele thermodesinfector

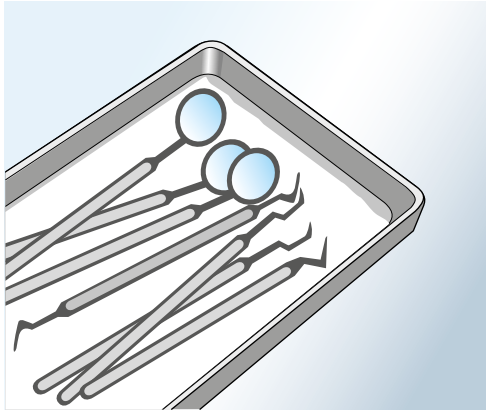


Na de behandeling

- Verwijder cementresten al tijdens de behandeling aan de stoel.
- Instrumenten in droge toestand bewaren.
- Maximaal 6 uur laten indrogen.

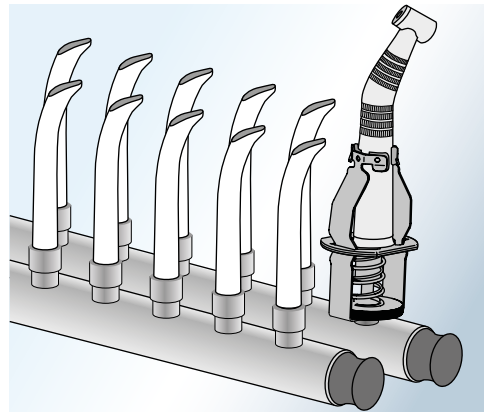


Thermodesinfector inruimen

- Plaats holle instrumenten op inspueters.
- Plaats handinstrumenten in zeefschalen.
- Plaats trays en mondspoelglazen in betreffende inzetten.

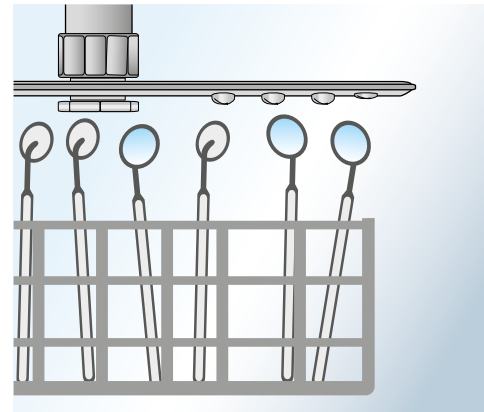

- Spoelarm niet blokkeren.
- Voorkom spoelschaduw bij het beladen.
- Behandel uitsluitend corrosiebestendige en thermostabiele instrumenten in de thermodesinfector.
- Mondspiegels mogen elkaar niet raken.

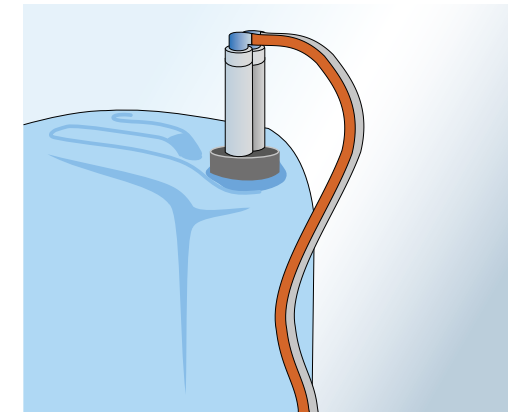

Dosering van de proceschemie

- Let op wanneer u de cans vervangt: doseerlansen van de reinigungs- en neutralisatiemiddelen niet verwisselen!
- Dosering van reinigungs- en neutralisatiemiddelen en indien nodig naspoelmiddel gebeurt automatisch.
- Let op de leegstandsignalering en vervang de can zodra het apparaat dit meldt.



Programmakeuze

- Selecteren via de programmatoetsen 1-3
- Vario TD Dental = standaardprogramma

Einde programma (afhankelijk van het type apparaat)

EcoDry: deur van het apparaat gaat automatisch open zodra het programma beëindigd is, zodat damp kan ontsnappen.

DryPlus: het apparaat start zelf het droogproces en droogt de materialen; aan het einde van de droogtijd volgt een optisch signaal.

Controleren

- Filter in spoelruimte, eventueel legen en reinigen.
- Indien aanwezig filter A 800 in het bovenrek 1 x per week reinigen met reinigungsborstel A 804.
- Bovenrek is rechtstreeks aangesloten op de watertoevoer.
- Reinigungscontrole bij onderhoud met Miele testkit.
- Desinfectieparameters (conform de RIVM-richtlijn R 8154) tijdens onderhoud.

Opmerkingen:

- Houdt u zich ook aan de uitvoerige instructies uit de gebruiksaanwijzing.
- Houdt u zich ook aan de specifieke aanwijzingen voor de behandeling van hand- en hoekstukken, turbines