

ProCare

Dent 30 C

Neutralizzante

Uso:

Concentrato liquido, acido, a base di acido citrico. Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici compresi strumenti di trasmissione nei termodisinfettori Miele Professional.

L'impiego di *ProCare Dent 30 C* è consigliabile soprattutto dove gli strumenti non possono essere trattati con un neutralizzante a base di acido fosforico (p.es. strumenti di trasmissione).

Caratteristica di qualità:

ProCare Dent 30 C soddisfa le norme indicate nella legislazione europea sui dispositivi medici. **CE MD**

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti.

Caratteristiche del prodotto:


- Buona compatibilità dei materiali
- Senza tensioattivi

Uso e dosaggio:

ProCare Dent 30 C di Miele è destinato ai processi nei termodisinfettori Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite una pompa di dosaggio.
- Tenere conto della resistenza agli acidi del carico e dei condotti di scarico.
- Per il dosaggio utilizzare dosatori adatti.
- Concentrazione: 1 ml/l
- Programma: Vario TD

Svolgimento del programma:

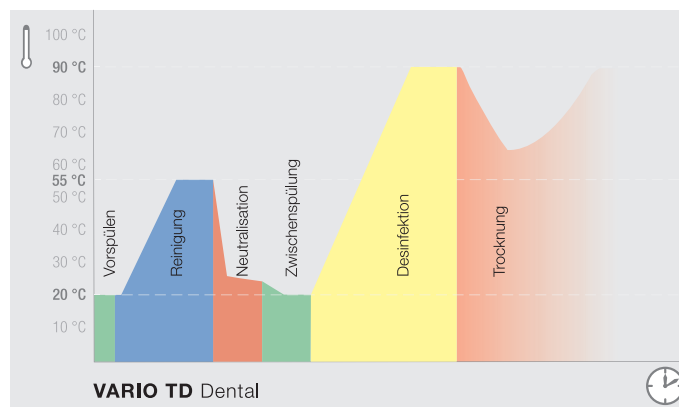

Svolgimento del processo

Vario TD:

- 1 **Prelavaggio** con acqua fredda, per eliminare lo sporco grossolano (p.es. sangue)
- 2 **Lavaggio**
- 3 **Neutralizzante** con *ProCare Dent 30 C*
- Risciacquo intermedio con acqua fredda
- 4 **Disinfezione termica** a 93 °C con un tempo di mantenimento di 5 minuti dopo il risciacquo finale
- 5 **Asciugatura**

La soluzione d'uso deve essere completamente risciacquata con acqua. In caso di utilizzo nei termodisinfettori Miele Professional, ciò è garantito dal programma Vario TD, se utilizzato correttamente (p.es. corretta disposizione del carico). Un accertamento viene eseguito tramite la misurazione del valore della conducibilità dell'acqua nel ciclo di risciacquo finale durante la messa in servizio o la manutenzione ordinaria del termodisinfettore.

Nel risciacquo finale si consiglia l'impiego di acqua demineralizzata per evitare che si formino patine o macchie di acqua e per proteggere l'alluminio anodizzato.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Per cambiare il prodotto occorre richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica.
- Il trattamento deve essere eseguito ai sensi della legislazione sui dispositivi medici e delle regolamentazioni in vigore con processi adatti e convalidati.
- Rispettare le raccomandazioni sul trattamento del produttore dei dispositivi medici in base alla norma DIN EN ISO 17664.
- Rispettare le istruzioni d'uso dei termodisinfettori Miele Professional.
- Solo per uso professionale.

ProCare

Dent 30 C

Neutralizzante


Dati tecnici:

- Densità (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- Valore pH (definito in acqua demineralizzata, 20 °C) 1 ml/l: ca. 3,0

Componenti per detersivi secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004:

- Conservanti (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on)

Indicazioni per la conservazione:

- Temperatura di conservazione da rispettare: da -3 °C a 30 °C
- Utilizzabile per 3 anni se la conservazione è corretta.
- Scadenza: vedi stampa sull'etichetta dietro il simbolo 

Nel corso della conservazione, nei fusti originali si possono verificare delle alterazioni del colore. Le caratteristiche tecniche di impiego non subiscono alterazioni.

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto.

Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezioni e accessori disponibili

Denominazione	Tanica	Numero materiale
ProCare Dent 30 C	Flacone da 1 l (coperchio con bocchettone di rabbocco)	12 187 230
ProCare Dent 30 C	Tanica da 5 l	12 187 250
Chiave per apertura tanica	Per taniche da 5 e da 20 l	11 851 600

Contatti:

Germania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27,
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel. +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Germania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de

Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefono +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional