

ProCare

Med 10 PRE

Przyjazny dla środowiska detergent do stosowania ręcznego

Instrukcja użytkowania

Zastosowanie

ProCare Med 10 PRE to łagodny detergent do dokładnego ręcznego przygotowania do użycia termostabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, inwazyjnych i nieinwazyjnych, takich jak narzędzia i przyrządy chirurgiczne, instrumenty MIS, sztywne endoskopy, sprzęt do znieczulania itp.

Jest również przeznaczony do namaczania narzędzi przed automatycznym przygotowaniem do użycia, zmniejszając w ten sposób ryzyko korozji narzędzi i wysychania zabrudzonych powierzchni.

ProCare Med 10 PRE nadaje się również do stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Właściwości

Dzięki optymalnej mieszance środków powierzchniowo czynnych, ProCare Med 10 PRE oferuje następujące właściwości:

- Obojętne pH
- Szerokie spektrum zgodności materiałowej
- Oparty na formule bez NTA i fosforanów
- Doskonała biodegradowalność

Zgodność materiałowa

Nadaje się do stali nierdzewnej, (anodowanego) aluminium, metali nieżelaznych, PVC, gumy, tworzyw sztucznych, ceramiki.

W przypadku materiałów niewymienionych powyżej prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu ustalenia, czy materiał jest odpowiedni.

Dozowanie i użycie

Zastosowanie	Dozowanie	Uwagi
Ręczne (wstępne) czyszczenie wyrobów medycznych	0.5–1.0%	Namoczyć narzędzia przez 2–15 min, w razie konieczności przetrzeć szczoteczką. Użyć roztworu tylko raz.
Czyszczenie ultradźwiękowe	0.5–1.0%	Ok. 5 min sonikacji.
Namaczanie instrumentów przed czyszczeniem automatycznym	0.2–0.5%	Użyć roztworu tylko raz.

Splukać narzędzia wodą po umyciu lub przed załadowaniem do myjni-dezynfektora.

Uwaga!

Nie mieszać z innymi produktami! • W przypadku zmiany produktów należy skontaktować się z serwisem Miele/Steelco • Przygotowanie do użycia powinno być zgodne ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz wykonywane przy użyciu odpowiednich, zatwierdzonych procesów. • Należy postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie dekontaminacji wydanymi przez producentów narzędzi, z uwzględnieniem wymagań normy ISO 17664.

ProCare

Med 10 PRE

Przyjazny dla środowiska detergent do stosowania ręcznego

Dane techniczne

Gęstość (koncentrat): 1.1 g/mL

Wartość pH (1% roztwór w wodzie demineralizowanej): ok. 7.5

Wygląd (koncentrat): przezroczysty, bezbarwny lub żółty

Skład

Środki powierzchniowo czynne, czynniki kompleksujące, inhibitory korozji

Transport i przechowywanie

Transportować i przechowywać produkt w temperaturze od 5°C do 25°C.

Ten wyrób medyczny jest wrażliwy na niskie temperatury. Jeśli temperatura otoczenia podczas transportu może być niższa niż 5°C, produkt ten należy transportować za pomocą kontenera ciężarowego/morskiego z kontrolowaną temperaturą powyżej 5°C lub używać kapturew ochronnych do transportu dłuższego niż 10 godzin, przy temperaturze transportu nie spadającej poniżej -5°C.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Pojemniki, nakrętki i etykiety zostały wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu. Przy utylizacji zużytych pojemników, w tym pojemników z pozostałościami produktu i przetworzonym roztworem, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i ścieków.

Informacje dotyczące utylizacji niewykorzystanego produktu dostępne są w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy dostępne są w karcie charakterystyki.

Oznaczenie CE

ProCare Med 10 PRE spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Dostępność

Zapytaj lokalnego przedstawiciela o obecne wymiary pojemników.

Dane kontaktowe

Niemcy

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
Fax +48 22 548-4010
info@miele.pl
www.miele.pl/professional

Włochy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Producent

Szwajcaria

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch