

ProCare Dent 10 MA

Producto de limpieza

Utilización:

Concentrado líquido, alcalino suave con tensioactivos Para la preparación a máquina de instrumental odontológico, incluido el instrumental de transmisión, en las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

ProCare Dent 10 MA ayuda a eliminar la suciedad orgánica, por ejemplo, la sangre y la saliva, y evita que se deposite de nuevo. Se recomienda eliminar los residuos de composite, cemento y materiales de impresión antes de que se endurezcan.

Características de calidad:

ProCare Dent 10 MA cumple los requisitos derivados de la normativa europea sobre productos sanitarios.



Si se produce un incidente grave con este producto, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Características del producto:


- Máxima protección del material
- El aluminio anodizado debe someterse a una prueba previa de idoneidad
- Contiene álcalis, tensioactivos y enzimas.

Aplicación y dosificación:

Miele ProCare Dent 10 MA se adapta a las secuencias de proceso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora
- Para la dosificación deben utilizarse aparatos de dosificación adecuados.
- Concentración de la aplicación
 - Limpieza ligeramente alcalina y con tensioactivos:
 - 3 ml/l para un tiempo de limpieza ≤ 10 minutos, temperatura de limpieza 55 °C
 - Limpieza enzimática:
 - 5 ml/l para un tiempo de limpieza > 10 minutos, temperatura de limpieza 45 °C a 50 °C
- Programa: Vario TD

Desarrollo del programa:

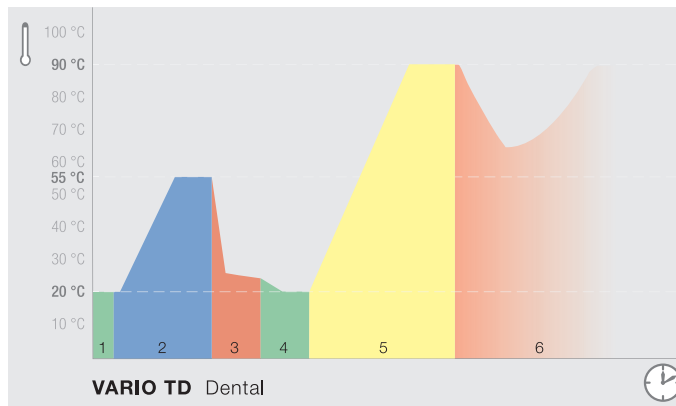

Desarrollo de procedimientos Vario TD:

- Prelavado con agua fría para eliminar la suciedad espesa (por ejemplo, la sangre)
- Limpieza con *ProCare Dent 10 MA* a 55 °C (temperatura de dosificación de 40 °C); para la limpieza enzimática se tendría que hacer un cambio de programa correspondiente
- Neutralización con *ProCare Dent 30 C*
- Aclarado intermedio con agua fría
- Desinfección térmica a 93 °C durante 5 minutos, incluido el enjuague final
- Secado

La solución de aplicación debe aclararse completamente con agua. En el caso de las lavadoras desinfectadoras de Miele Professional, esto queda garantizado si se utiliza correctamente el programa Vario TD (por ejemplo, la clasificación correcta de los utensilios de lavado). La verificación se realiza midiendo el aumento de la conductancia en el ciclo de aclarado final durante la puesta en funcionamiento o el mantenimiento rutinario de la lavadora desinfectadora.

Se recomienda el uso de agua completamente desmineralizada en el aclarado final para evitar la formación de depósitos y manchas de agua y para proteger el aluminio anodizado.

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Para la sustitución del producto, contactar al Servicio Post-venta de Miele o a un servicio técnico autorizado.
- La preparación debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, utilizando procedimientos adecuados y validados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de preparación del fabricante del dispositivo médico de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- Deben respetarse las instrucciones de uso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.
- Solo para uso industrial.

ProCare Dent 10 MA

Producto de limpieza


Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): aprox. 1,1 g/cm³
- Valor pH (Determinado con agua completamente desmineralizada, 20 °C) 3 ml/l: a 5 ml/l: aprox. 10,6 a 10,7

Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- < 5 % de tensioactivos no iónicos y aniónicos
- Así como enzimas

Indicaciones de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento: 0 °C hasta 25 °C
- Proteger de la luz del sol.
- Válido durante 2 años si se conserva correctamente
- Usar hasta: ver impresión en la etiqueta junto al símbolo 

Durante el tiempo de almacenamiento, pueden producirse cambios de color en los envases cerrados originalmente. Esto no influye en las propiedades de la aplicación.

Advertencias de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias. De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Envases suministrables y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
ProCare Dent 10 MA	Bombona de 5 l	12392590
Llave para bombona	Para todas las bombonas	11851600
DTD 2 bandeja colectora	Bombona de 5 y 10 l	10695460

Datos de contacto:**Alemania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 Alcobendas/Madrid
Tel.: +34 91 62 32 000
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

**Alemania**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de