

ProCare

Med 13 PRE

Brugsanvisning

Mildt alkalisk, enzymatisk forbehandlingsikum

Anvendelse

ProCare Med 13 PRE er et brugsklart, mildt alkalisk, enzymatisk rengøringsikum baseret på en speciel kombination af enzymer og overfladeaktive stoffer, der har til formål at holde genanvendeligt, invasivt og ikke-invasivt, termostabilt og termolabilt medicinsk udstyr, der er forurenet med blod og organisk væv, såsom kirurgiske instrumenter og redskaber, MIS-instrumenter, stive endoskoper og andet medicinsk udstyr, fugtigt og beskytte det mod korrosion under transport fra anvendelsessted til genbehandlingsområde.

Egenskaber

Baseret på den specielle, enzymatiske formulering holder ProCare Med 13 PRE instrumenterne effektivt fugtige og tilbyder følgende egenskaber:

- Minimerer vedhæftningen af organisk, kirurgisk snavs, og gør dermed rengøring i rengørings- og desinfektionsmaskinen lettere
- Beskytter mod korrosion
- Let at skylle allerede ved omgivende temperatur
- Stabilt skum
- Velegnet til aluminium og anodiseret aluminium
- Sikker og bæredygtig for bruger og patient

Materialekompatibilitet

Velegnet til rustfrit stål, (anodiseret) aluminium, titanium, ikke-jernholdige metaller, forkromede materialer, plastmaterialer, elastomerer inklusive polyuretan og silikone, gummi, latex, polytetrafluorethylen (PTFE, f.eks. Teflon), keramik og glas. Der er ingen kendt materialeinkompatibilitet.

Kontakt den lokale repræsentant for at få oplyst, om et materiale, der ikke er nævnt herover, er egnet.

Dosering og påføring

ProCare Med 13 PRE er en brugsklar skumspray, som påføres direkte på tilsmudsede genstande på brugslokationen for det medicinske udstyr straks efter brug. Det skal påføres på en sådan måde, at fuldstændig dækning og fugtning af instrumenter sikres, så optimal effektivitet opnås.

Afskylning af skummet inden yderligere behandling eller tilstrækkelig afskylning i rengørings- og desinfektionsmaskinen kan være gunstigt for automatiseret processtabilitet.

Bemærk!

Bland ikke med andre produkter! • Kontakt Miele/Steelco Service ved skift af produkter. • Følg anbefalingerne om genbehandling udstedt af instrumentproducenter med hensyn til bestemmelserne i ISO 17664.

ProCare

Med 13 PRE

Mildt alkalisk, enzymatisk forbehandlingskum

Tekniske data

Densitet (brugsklar opløsning): 1,0 g/ml

pH-værdi (brugsklar opløsning): ca. 8,4

Udseende (brugsklar opløsning): klar, farveløs

Ingredienser

Overfladeaktive stoffer, enzym, opløsningsmidler, konserveringsmidler

Transport og opbevaring

Transporter og opbevar produktet ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.

Dette medicinske udstyr er følsomt over for kulde. Ved risiko for omgivelsestemperaturer under 5°C under transporten, skal dette produkt sendes med temperaturstyret lastbil / forsendelsescontainer over 5°C eller med brug af isolerende foranstaltninger til transport, så den omgivende temperatur ikke falder under minus 5°C i længere tid end 10 timer.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Beholdere, hætter og mærkater er fremstillet af genanvendelig polyetylen. Lokale forskrifter for affald og spildevand skal følges ved bortskaffelse af brugte beholdere inkl. beholdere med produktrester og forarbejdet opløsning.

Se sikkerhedsdatabladet vedrørende bortskaffelse af ubrugt produkt.

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsdatabladet for at få oplysninger om arbejdssikkerhed.

CE-mærkning

ProCare Med 13 PRE opfylder kravene for medicinsk udstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Tilgængelighed

Spørg den lokale repræsentant om beholderstørrelser.

Kontaktdata**Tyskland**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 GLOSTRUP
Tel. +45 43271100
Fax +45 43271109
info@miele.dk
www.miele.dk

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Producent**Schweiz**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch