

ProCare

Med 10 BPD



Decalcificante

Uso:

Liquido concentrato, acido, a base di acidi organici. Per il trattamento di padelle e pappagalli nelle lavapadelle Miele Professional.

ProCare Med 10 BPD impedisce che si formino depositi calcarei nel generatore di vapore, nei condotti e negli ugelli. In caso di sporco ostinato si consiglia l'aggiunta del detergente *ProCare Med 10 BPA*.

Caratteristica di qualità:

ProCare Med 10 BPD soddisfa le norme indicate nella legislazione sui dispositivi medici.



Caratteristiche del prodotto:

- utilizzabile anche con durezza dell'acqua alte

ProCare Med 10 BPD è predisposto solo per l'uso professionale.


Uso e dosaggio:

Il decalcificante *ProCare Med 10 BPD* e le lavapadelle PWD 8541, PWD 8545, PWD 8546, PWD 8549 si combinano in modo perfetto.

- Dosaggio esatto ed economico tramite una pompa di dosaggio
- Concentrazione: 0,5 – 1,5 ml/l in base alla durezza dell'acqua
- Programmi Breve, Standard, Intenso e Utenti.
- Fare attenzione alla resistenza agli acidi della lavapadelle e del sistema di dosaggio.

Svolgimento del programma:

esempio del programma Standard della PWD 8545.

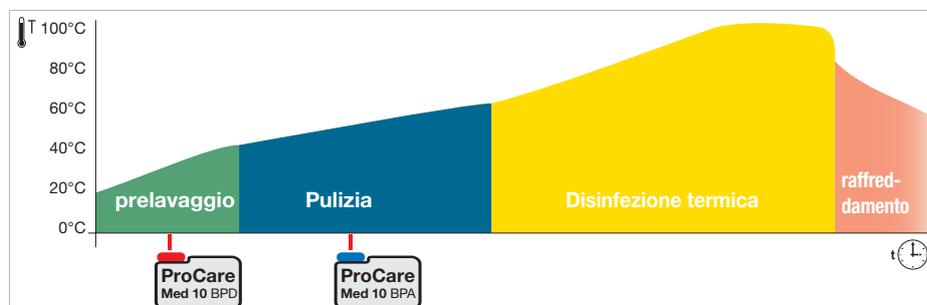

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Prima di cambiare prodotto risciacquare bene con acqua il sistema di dosaggio compresi i tubi di aspirazione.
- Il trattamento deve essere effettuato in base alla raccomandazione KRINKO¹ e BfArM² e alla normativa per i gestori sui dispositivi medici con un processo adatto.
- Rispettare le raccomandazioni sul trattamento del produttore dei dispositivi medici in base alla norma DIN EN ISO 17664.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavapadelle Miele Professional.

¹Commissione per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni e ²Istituto tedesco per medicinali e dispositivi medici.

ProCare Med 10 BPD



Decalcificante

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): ca. 1,1 g/cm³
- Valore pH (definito in acqua demineralizzata, 20 °C) 0,5 – 1,5 ml/l: ca. 3,7 – 3,0

Ingredienti per detersivo secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004:

- < 5 % poliacbossilati
- Conservanti
(sorbato di potassio, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone)

Indicazioni di conservazione:

- Temperatura di conservazione da rispettare: 0 – 30 °C
- Utilizzo per 3 anni se la conservazione è corretta
- Scadenza: vedi stampa sull'etichetta dietro il simbolo 

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto. Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e tentativi. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezioni e accessori disponibili

Denominazione	Tanica	Mat.-Nr.
ProCare Med 10 BPD	Tanica da 5 l	11233190
Chiave tanica	per 5 l	9066810

Contatti:

Germania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Lussemburgo

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxemburg
Tel. +352 (0) 4971125
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Austria

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Tel. +43 (0) 50800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefono +39 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Germania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de