

ProCare

Med 30 C

Neutralizador basado en ácido orgánico

Instrucciones de uso

Aplicación

ProCare Med 30 C es un neutralizador ácido para usar en lavadoras desinfectadoras después de una limpieza automatizada moderadamente alcalina de dispositivos médicos reutilizables, termoestables y termolábiles, invasivos y no invasivos, como instrumental quirúrgico, instrumental microquirúrgico e instrumental MIC, así como endoscopios rígidos, equipos de anestesia, material para respiración asistida, utensilios hospitalarios, depósitos de esterilización de aluminio y cualquier otro equipo médico.

Propiedades

ProCare Med 30 C es un neutralizador moderadamente ácido que cuenta con las siguientes propiedades:

- Elimina de forma delicada los residuos alcalinos de los objetos a tratar.
- Puede prolongar la vida útil del instrumental evitando las manchas en los artículos procesados con detergentes alcalinos que podrían causar un daño irreversible a los materiales en las fases más avanzadas del ciclo de tratamiento, por ejemplo, durante la esterilización.
- Compatible con material anestésico.
- Compatible con aluminio.
- Sin tensioactivos.
- Sin fosfatos.

Compatibilidad con materiales

Compatible con acero inoxidable, aluminio (anodizado), materiales plásticos, caucho, vidrio y cerámica.

Para los materiales que no se hayan mencionado anteriormente, póngase en contacto con su representante local de ventas para determinar si el material es adecuado o no.

Dosificación y aplicación

La dosificación óptima depende en gran medida de la cantidad de residuos alcalinos. Se debe garantizar la completa eliminación del líquido de lavado antes de la neutralización. En la práctica, la fase de neutralización con una dosificación de 1 a 3 mL/L garantiza unos buenos resultados con un mínimo de 1 min después de la limpieza con detergentes alcalinos, como ProCare Med 10 MA. Consulte las instrucciones de uso de ProCare Med 10 MA para obtener más detalles.

Se debe garantizar un aclarado intermedio adecuado después de la fase de neutralización con ProCare Med 30 C durante al menos 1 min para asegurar que no se dejan marcas en los artículos procesados y para evitar la corrosión.

En el caso de las lavadoras desinfectadoras Miele y Steelco, podrá consultar información específica sobre los ciclos del programa indicados para las distintas disciplinas médicas en sus instrucciones de uso correspondientes.

Tenga en cuenta lo siguiente

No mezclar con otros productos. • Llamar al servicio técnico de Miele/Steelco a la hora de cambiar productos. • El procesado debe cumplir todas las disposiciones en virtud de la normativa de dispositivos médicos y deberá llevarse a cabo mediante procesos apropiados y validados. • De acuerdo con las normativas nacionales o con la norma EN ISO 15883, se deberá llevar a cabo una cualificación del rendimiento. • Seguir las recomendaciones sobre el tratamiento posterior emitido por los fabricantes del instrumental en relación con las disposiciones de la norma ISO 17664. • Se deben seguir las instrucciones operativas relacionadas con las lavadoras desinfectadoras Miele/Steelco. • Si se va a utilizar en lavadoras desinfectadoras que no sean de la marca Miele/Steelco, consulte al fabricante de la lavadora desinfectadora y sus instrucciones de uso.

ProCare

Med 30 C

Neutralizador basado en ácido orgánico

Ficha técnica

Densidad (concentrado): 1.2 g/mL

Valor pH (solución al 1 % en agua desmineralizada): aprox. 2.6

Aspecto (concentrado): transparente, incoloro

Ingredientes

Ácido orgánico

Transporte y almacenamiento

Almacene el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los envases, los tapones de rosca y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Para la eliminación de envases utilizados, incluidos los que contengan producto residual y solución procesada, se deben seguir las directrices locales sobre residuos y sobre aguas residuales.

Para obtener información sobre la eliminación de un producto sin utilizar, consulte la ficha técnica de seguridad.

Información sobre seguridad

Para obtener información sobre seguridad laboral, consulte la ficha técnica de seguridad.

Marcado CE

ProCare Med 30 C cumple con los requisitos para los productos sanitarios en conformidad con el Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, consulte a su representante.

Información de contacto**Alemania**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
Fax +34 916620266
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante**Suiza**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch