

ProCare

Med 10 A

Alkaliskt allroundrengöringsmedel för automatiserad bearbetning

Bruksanvisning

Användning

ProCare Med 10 MA är ett materialvänligt, alkaliskt rengöringsmedel för diskdesinfektorer för automatiserad bearbetning av återanvändbara, värmestabila, invasiva och icke-invasiva medicintekniska produkter som exempelvis kirurgiska, mikrokirurgiska och MIS-instrument, anesthesi- och ventilationsutrustning samt annan medicinsk utrustning.

Egenskaper

ProCare Med 10 MA är ett alkaliskt rengöringsmedel med följande egenskaper:

- Avlägsnar varsamt men effektivt blod, vävnadsrester och proteiner.
- Utmärkt förmåga att avlägsna och lösa upp föroreningar.
- Särskilt utvecklat för användning i diskdesinfektorer.
- Utmärkt materialkompatibilitet.
- Fritt från ytaktiva ämnen och kaustik alkali.

Materialkompatibilitet

Lämpligt för rostfritt stål, plastmaterial, elastomerer, gummi, latex, keramik och glas. Inte kompatibelt med (anodiserat) aluminium och titan.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

Dosering och användning

Optimal dosering beror på faktorer som exempelvis vattnets hårdhet och föroreningens karaktär. Användning av avhärdat vatten förbättrar i allmänhet rengöringens resultat. Följaktligen kan doseringen minskas.

En dosering på 3–10 ml/l ger goda resultat med en tid på minst 10 minuter vid 60 °C.

Genomför en mellanliggande sköljning med vatten eller ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C för anestesimaterial) i minst 1 min efter rengöringsfasen. Se bruksanvisningen till ProCare Med 30 P för mer information.

För diskdesinfektorer från Miele och Steelco finns specifik information om fullständiga programcykler för olika medicinska specialiteter i respektive bruksanvisning.

Obs!

Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter. • Bearbetningen ska följa alla bestämmelser i enlighet med förordningarna om medicintekniska produkter och ska genomföras med lämpliga validerade processer. • I enlighet med nationella riktlinjer och/eller EN ISO 15883 krävs en prestandakvalificering. • Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664. • Följ bruksanvisningarna till diskdesinfektorerna från Miele/Steelco. • För användning i diskdesinfektorer från andra tillverkare än Miele/Steelco hänvisas till bruksanvisningarna från respektive tillverkare.

ProCare

Med 10 A

Alkaliskt allroundrengöringsmedel för automatiserad bearbetning

Tekniska uppgifter

Densitet (koncentrat): 1,4 g/ml.

pH-värde (1 % lösning i demineraliserat vatten): cirka 11,3.

Utseende (koncentrat): genomskinligt, färglöst.

Ingredienser

Alkali, komplexbildare, korrosionshämmare och sekvestreringsmedel.

Transport och förvaring

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Information om kassering och återvinning

Behållare, skruvlock och etiketter är tillverkade av återvinningsbar polyeten. Lokala bestämmelser om avfall och avloppsvatten ska följas vid kassering av använda behållare, inklusive behållare med restprodukt och bearbetad lösning.

Information om kassering av oanvänd produkt finns i säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet finns i säkerhetsdatabladet.

CE-märkning

ProCare Med 10 A uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

Kontaktuppgifter

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel.+46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Tillverkare

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch