

ProCare

Med 10 PRE

Umweltfreundlicher, manueller Reiniger

Gebrauchsanweisung

Verwendung

ProCare Med 10 PRE ist ein mildes Reinigungsmittel für die sorgfältige manuelle Aufbereitung von wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht-invasiven Medizinprodukten, darunter chirurgische Instrumente und Utensilien, Instrumente der minimal invasiven Chirurgie, starren Endsokopen, Anästhesiematerial etc.

Das Produkt eignet sich auch zum Einweichen von Instrumenten vor der maschinellen Aufbereitung, um das Risiko von Korrosion zu minimieren und zu verhindern, dass Verschmutzungen an Oberflächen antrocknen.

ProCare Med 10 PRE ist auch für den Einsatz in einem Ultraschallbad geeignet.

Produkteigenschaften

ProCare Med 10 PRE, das auf einer optimalen Zusammensetzung aus Tensiden basiert, bietet die folgenden Eigenschaften:

- pH-neutral
- Umfassende Materialverträglichkeit
- Basiert auf einer NTA- und phosphatfreien Formel
- Biologisch abbaubar

Materialverträglichkeit

Geeignet für Edelstahl, (eloxiertes) Aluminium, Nichteisenmetalle, PVC, Gummi, Kunststoffe, Keramik.

Für Materialien, die oben nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um in Erfahrung zu bringen, ob das Produkt für das Material geeignet ist.

Dosierung und Anwendung

Verwendung	Dosierung	Anmerkungen
Manuelle (Vor-)Reinigung von Medizinprodukten	0.5 – 1.0 %	Instrumente 2 – 15 Minuten lang einweichen, ggf. bürsten. Lösung nur einmal verwenden.
Reinigung im Ultraschallbad	0.5 – 1.0 %	Beschallungsdauer: ca. 5 Minuten.
Einweichen von Instrumenten vor der maschinellen Reinigung	0.2 – 0.5 %	Lösung nur einmal verwenden.

Spülen Sie die Instrumente nach der Reinigung oder vor dem Einlegen in das Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Wasser.

Bitte beachten!

Nicht mit anderen Produkten mischen. • Vor einem Produktwechsel wenden Sie sich bitte an Miele/Steelco. • Die Aufbereitung muss entsprechend aller Vorschriften im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu Medizinprodukten erfolgen und mit geeigneten, validierten Verfahren durchgeführt werden. • Halten Sie sich an die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der ISO 17664.

ProCare

Med 10 PRE

Umweltfreundlicher, manueller Reiniger

Technische Daten

Dichte (Konzentrat): 1.1 g/mL

pH-Wert (1 % Lösung in vollentsalztem Wasser): ca. 7.5

Aussehen (Konzentrat): transparent, farblos bis gelb

Inhaltsstoffe

Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren

Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C zu transportieren und zu lagern. Dieses Medizinprodukt ist kälteempfindlich. Wenn die Umgebungstemperatur beim Transport voraussichtlich unter 5 °C liegt, muss das Produkt in einem temperaturgeregelten LKW/Seefrachtcontainer bei einer Temperatur von mehr als 5° C transportiert werden. Oder verwenden Sie Schutzabdeckungen bei Transporten, die länger als 10 Stunden dauern und bei denen die Umgebungstemperatur nicht unter minus 5 °C fällt.

Entsorgung und Recycling

Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycelbarem Polyethylen. Für die Entsorgung gebrauchter Behälter, einschliesslich solcher mit Produktrückständen und aufbereiteter Lösung, müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften beachtet werden. Für die Entsorgung des ungebrauchten Produkts beachten Sie bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Informationen zur Arbeitssicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung

ProCare Med 10 PRE erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

Verfügbarkeit

Bei Fragen zu aktuellen Behältergrössen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Kontaktdaten

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Geschäftsbereich Professional
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 800 22 44 644
Fax +49 800 33 55 533
vertrieb@miele-professional.de
service@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Hersteller

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch