

ProCare

Med 40

Biokompatibler Klarspüler

Gebrauchsanweisung

Verwendung

ProCare 40 ist eine Trocknungshilfe für die Schlusspülung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zur Aufbereitung von invasiven und nicht-invasiven, thermostabilen und thermolabilen Medizinprodukten, darunter chirurgische Instrumente, mikrochirurgische Instrumente, Instrumente der minimal invasiven Chirurgie, Utensilien sowie Grossraum-Reinigungsanlagen von Steelco, zum Beispiel für Krankenhausbetten.

Produkteigenschaften

ProCare Med 40 ist ein Nachspülmittel mit den folgenden Eigenschaften:

- Reduziert die Oberflächenspannung von Wasser
- Reduziert Wasserflecken auf dem Spülgut
- Verkürzt die Trocknung erheblich
- Geprüfte Biokompatibilität
- pH-neutral

Materialverträglichkeit

Geeignet für Edelstahl, (eloxiertes) Aluminium, Nichteisenmetalle, PVC, Gummi, Kunststoffe, Keramik. Bei Geräten und Komponenten aus Polysulfon (PSU) und Polyphenylsulfon (PPSU), PVC oder Gummi können Spannungsrisse entstehen. Vor dem Einsatz müssen entsprechende Eignungstest durchgeführt werden.

Für Materialien, die oben nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um in Erfahrung zu bringen, ob das Produkt für das Material geeignet ist.

Dosierung und Anwendung

Je nach Wasserqualität hat sich in der Praxis eine Dosierung von 0.3 bis 1.0 mL/L bewährt. Für die thermische oder chemothermische Desinfektion (Schlusspülung) sollte immer vollentsalztes Wasser / Umkehrosmose-Wasser verwendet werden. Die Dosiertemperatur sollte mindestens 40 °C betragen.

Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele und Steelco werden spezielle Informationen zu den vollständigen Programmzyklen für verschiedene medizinische Fachrichtungen in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen angegeben.

Bitte beachten!

Nicht geeignet für Anästhesie-Utensilien. • Nicht mit anderen Produkten mischen. • Vor einem Produktwechsel wenden Sie sich bitte an Miele/Steelco. • Die Aufbereitung muss entsprechend aller Vorschriften im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu Medizinprodukten erfolgen und mit geeigneten, validierten Verfahren durchgeführt werden. • Nach nationalen Vorschriften bzw. der EN ISO 15883 ist eine Leistungs-Qualifikation (LQ) erforderlich. • Halten Sie sich an die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der ISO 17664. • Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele/Steelco. • Wenn Sie das Produkt für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von einem anderen Anbieter als Miele/Steelco verwenden wollen, beachten Sie die Anweisungen des entsprechenden Herstellers.

ProCare

Med 40

Biokompatibler Klarspüler

Technische Daten

Dichte (Konzentrat): 1.0 g/mL

pH-Wert (1 % Lösung in vollentsalztem Wasser): ca. 7.9

Aussehen (Konzentrat): transparent, farblos bis gelb

Inhaltsstoffe

Tenside, organische Säure, Konservierungsstoffe

Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C zu transportieren und zu lagern. Dieses Medizinprodukt ist kälteempfindlich. Wenn die Umgebungstemperatur beim Transport voraussichtlich unter 5 °C liegt, muss das Produkt in einem temperaturgeregelten LKW/Seefrachtcontainer bei einer Temperatur von mehr als 5° C transportiert werden. Oder verwenden Sie Schutzabdeckungen bei Transporten, die länger als 10 Stunden dauern und bei denen die Umgebungstemperatur nicht unter minus 5 °C fällt.

Entsorgung und Recycling

Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycelbarem Polyethylen. Für die Entsorgung gebrauchter Behälter, einschliesslich solcher mit Produktrückständen und aufbereiteter Lösung, müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften beachtet werden. Für die Entsorgung des ungebrauchten Produkts beachten Sie bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Informationen zur Arbeitssicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung

ProCare Med 40 erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

Verfügbarkeit

Bei Fragen zu aktuellen Behältergrössen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Kontaktdaten

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Geschäftsbereich Professional
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 800 22 44 644
Fax +49 800 33 55 533
vertrieb@miele-professional.de
service@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Hersteller

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch