

ProCare Dent 10 MA

Detergente

Utilización:

Concentrado líquido, alcalino suave Para la preparación a máquina de instrumental odontológico, incluido el instrumental de transmisión, en las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

ProCare Dent 10 MA ayuda a eliminar la suciedad orgánica, por ejemplo, la sangre y la saliva, y evita que se deposite de nuevo. Se recomienda eliminar a grosso modo los restos de composite, cemento y material de impresión antes del curado.

Características de calidad:

ProCare Dent 10 MA cumple los requisitos derivados de la normativa europea sobre productos sanitarios.



Si se produce un incidente grave con este producto, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Características del producto:


- Alta protección del material
- Se debe comprobar la idoneidad del aluminio anodizado.
- Contiene álcalis, tensioactivos y enzimas.

Aplicación y dosificación:

ProCare Dent 10 MA se adapta a las secuencias de proceso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora
- Para la dosificación deben utilizarse aparatos de dosificación adecuados.
- Concentración de aplicación: de 3 ml/l a 7 ml/l, de 5 min a 10 min, de 45 °C a 55 °C
- Programa: Vario TD
- Temperatura mínima de dosificación: ≥ 40 °C

Desarrollo del programa:

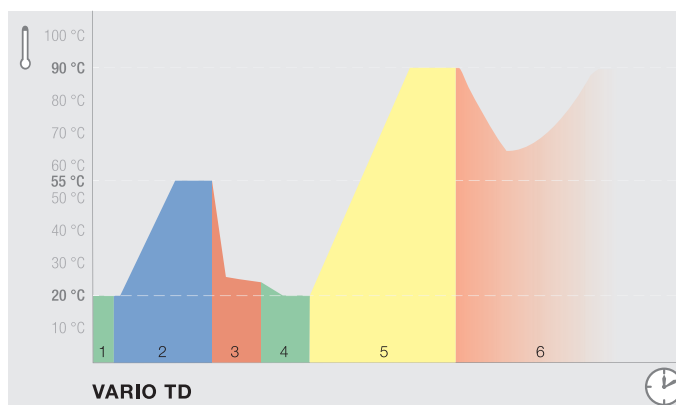

Desarrollo de procedimientos

Vario TD:

1. Prelavado

Agua fría (descalcificada), sin calentamiento, sin productos químicos de procesos

2. Limpieza

Agua fría / caliente (descalcificada), con calentamiento, con *ProCare Dent 10 MA*

3. Neutralización

Agua fría / caliente (descalcificada), sin calentamiento, con *ProCare Dent 30 C*

4. Aclarado intermedio

Agua fría / caliente (descalcificada), sin calentamiento

5. Desinfección térmica

a > 90 °C durante 5 minutos, incluido el aclarado final

6. Secado

La solución de aplicación debe aclararse completamente con agua. En el caso de las lavadoras desinfectadoras de Miele Professional, esto queda garantizado si se utiliza correctamente el programa Vario TD (por ejemplo, la clasificación correcta de los utensilios de lavado). Durante la puesta en funcionamiento o el mantenimiento rutinario de la lavadora desinfectadora se realiza una verificación midiendo el aumento de conductancia en el último aclarado.

Se recomienda el uso de agua completamente desmineralizada en el aclarado final para evitar la formación de depósitos y manchas de agua y para proteger el aluminio anodizado.

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes del cambio de producto hay que enjuagar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- La preparación debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, utilizando procedimientos adecuados y validados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de preparación del fabricante del dispositivo médico de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- Deben respetarse las instrucciones de uso de las lavadoras desinfectadoras Miele Professional.
- Solo para uso industrial.

ProCare Dent 10 MA

Detergente

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): aprox. 1,1 g/cm³
- Valor pH (Determinado con agua completamente desmineralizada, 20 °C) 3 ml/l: a 7 ml/l: aprox. 10,6 a 10,7

Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- < 5 % de tensioactivos no iónicos y aniónicos
- Así como enzimas

Indicaciones de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento: 0 °C hasta 25 °C
- Proteger de la luz del sol.
- Válido durante 2 años si se conserva correctamente.
- Usar no más tarde de: ver impresión en la etiqueta detrás del símbolo 

Durante el tiempo de almacenamiento, pueden producirse cambios de color en los envases cerrados originalmente.

Esto no influye en las propiedades de la aplicación.

Advertencias de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias. De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Envases suministrables y accesorios:

Denominación	Envase
ProCare Dent 10 MA	Garrafa de 5 l
Llave para garrafa	para garrafas de 5, 10 y 20 l
Bandeja colectora DTD 2	Para garrafas de 5 y 10 l

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburgo
www.drweigert.de