

ProCare Dent 30 C

Produto neutralizador

Utilização:

Concentrado líquido, ácido, à base de ácido cítrico. Para o reprocessamento mecânico de instrumentos dentários, incluindo instrumentos de transferência em máquinas de lavar e desinfetar Miele Professional.

A utilização de *ProCare Dent 30 C* é particularmente recomendada quando os instrumentos não podem ser reprocessados com um produto neutralizador de ácido fosfórico (p. ex., instrumentos de transferência).

Caraterística de qualidade:

ProCare Dent 30 C cumpre as especificações resultantes da legislação europeia relativa a dispositivos médicos. **CE MD**

Se surgir algum incidente grave com este produto, isto deve ser notificado ao fabricante e à autoridade competente.

Caraterísticas do produto:


- Boa compatibilidade com o material.
- Sem tensioativos.

Utilização e dosagem:

O *ProCare Dent 30 C* foi concebido para os procedimentos nas máquinas de lavar e desinfetar térmicas da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora.
- Para a dosagem devem ser utilizados aparelhos de dosagem adequados.
- Deve ter-se em atenção a resistência aos ácidos do material a lavar e dos tubos de esgoto.
- Concentração de utilização: 1 ml/l
- Seleção do programa: Vario TD
- Temperatura mínima de dosagem: $\geq 15^{\circ}\text{C}$

Sequência do programa:

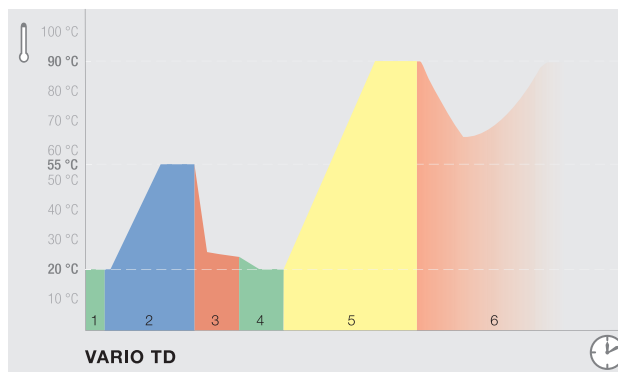

Sequência do processo

Vario TD:

1 Pré-lavagem

Água fria (descalcificada), sem aquecimento

2 Lavagem

Água fria/água quente (descalcificada), com aquecimento, com produtos de limpeza alcalinos

3 Neutralização

Água fria/água quente (descalcificada), sem aquecimento, com *ProCare Dent 30 C*

4 Enxaguagem intermédia

Água fria/água quente (descalcificada), sem aquecimento

5 Desinfecção térmica

a $> 90^{\circ}\text{C}$ durante 5 minutos de tempo de retenção na enxaguagem final

6 Secagem

A solução de aplicação deve ser totalmente enxaguada com água. Quando usado corretamente (p. ex. arrumação correta do material a lavar), ao utilizar em máquinas de lavar e desinfetar Miele Professional, isto é indicado pelo programa Vario TD. Uma verificação ocorre através da medição do aumento da condutividade no ciclo de enxaguagem final no âmbito da colocação em funcionamento ou da manutenção de rotina da máquina de lavar e desinfetar. Recomenda-se a utilização de água desmineralizada na enxaguagem final, de forma a evitar depósitos e manchas de água e a proteger o alumínio anodizado.

Tenha em atenção!

- Não misturar com outros produtos.
- Antes da troca de produto, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- O reprocessamento deve ser efetuado de acordo com a legislação relativa a dispositivos médicos e com os regulamentos válidos com procedimentos adequados validados.
- Observe as recomendações de reprocessamento do fabricante dos dispositivos médicos conforme os requisitos da DIN EN ISO 17664.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar e desinfetar Miele Professional devem ser observadas.
- Só para utilizações no setor industrial.

ProCare Dent 30 C

Produto neutralizador

Caraterísticas técnicas:

- Densidade (20 °C): aprox. 1,2 g/cm³
- Valor pH (determinado em água desmineralizada a 20 °C) 1 ml/l: aprox. 3,0

Ingredientes para produtos de limpeza de acordo com o Regulamento CE n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

- Agente de conservação (2-octil-2H-isotiazol-3-ona)

Indicações de armazenamento:

- Temperatura de armazenamento: -3 °C a 30 °C
- Com armazenamento adequado, utilizável durante 3 anos.
- Utilizável até: consultar a data na etiqueta atrás do símbolo 

Durante o período de armazenamento podem ocorrer variações de cor em recipientes originalmente fechados. As caraterísticas técnicas de aplicação não são influenciadas.

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consultar a ficha de dados de segurança.

Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente
<i>ProCare Dent 30 C</i>	Recipiente de produtos de 5 l
Chave para tampa do recipiente	para recipientes de produtos de 5 l, 10 l e 20 l
Tabuleiro apara-pingos DTD 2	para recipientes de produtos de 5 l e 10 l

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, n.º5
2790-073 Carnaxide
Tel. +351 21 4248 100
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de