

### Produit de rinçage final

#### Utilisation :

Concentré liquide. Pour le traitement mécanique d'instruments dentaires, y compris les instruments de transfert dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

#### Caractéristique de qualité :

ProCare Dent 40 est conforme aux exigences de la législation en matière de dispositifs médicaux en vigueur. **CE MD**

Le fabricant et les autorités compétentes doivent signaler tout incident grave lié à ce produit.

#### Caractéristiques du produit :


- Améliore et accélère le séchage d'instruments dentaires lors d'un traitement en machine.
- Les résidus alcalins et les eaux alcalines sont neutralisés.

#### Utilisation et dosage :

Miele ProCare Dent 40 est adapté aux procédures des laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Pour le dosage, il faut utiliser des doseurs appropriés.
- Concentration utilisée : 0,3 ml/l sur le doseur de porte pour le produit de rinçage
- Sélection du programme : Vario TD
- Température de dosage minimale :  $\geq 70$  °C

#### Déroulement de programme :

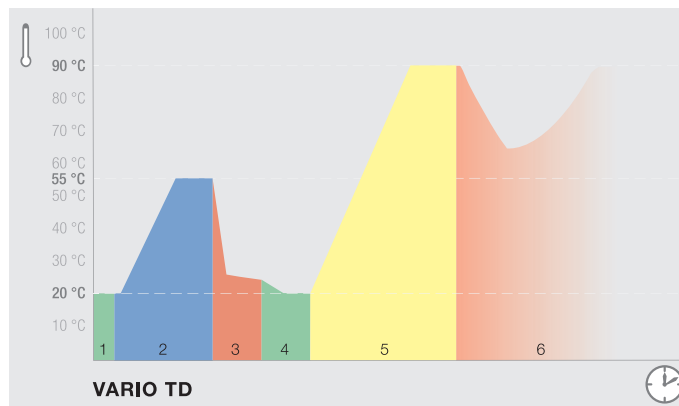

#### Procédure Vario TD :

- 1 Pré lavage**  
Eau froide (adoucie), sans chauffage
- 2 Lavage**  
Eau froide/chaude (adoucie), avec chauffage, avec produits chimiques
- 3 Neutralisation**  
Eau froide/chaude (adoucie), sans chauffage, avec produits chimiques
- 4 Rinçage intermédiaire**  
Eau froide/chaude (adoucie), sans chauffage
- 5 Désinfection thermique**  
pour températures  $> 90$  °C pendant 5 minutes, dernier rinçage inclus avec ProCare Dent 40
- 6 Séchage**

Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final afin d'empêcher l'apparition de dépôts et de taches d'eau ainsi que de protéger l'aluminium anodisé.

#### Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le tuyau d'aspiration, à l'eau.
- Le traitement doit être effectué selon les dispositifs médicaux et les réglementations en vigueur avec un processus validé et adapté.
- Les recommandations de traitement du fabricant du dispositif médical doivent être respectées conformément aux directives de la norme DIN EN ISO 17664 (CAN/CSA-Z17664).
- Respectez les instructions de fonctionnement des laveurs-désinfecteurs de Miele Professional.
- Uniquement à usage professionnel.

### Produit de rinçage final


#### Caractéristiques techniques :

- Masse volumétrique (20 °C) : env. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur pH (définie en eau déminéralisée, 20 °C) 0,3 ml/l : env. 3,8

#### Composants pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- < 5 % de phosphonate
- 15 à 30 % de tensio-actifs non ioniques
- Contient aussi des agents de conservation (méthylchloroisothiazolinone/méthylisothiazolinone)

#### Conseils de stockage :

- Température de stockage conseillée : 0 °C à 30 °C
- En cas de stockage approprié : utilisable 3 ans.
- Utilisable jusqu'en : voir mention sur l'étiquette derrière le symbole 

#### Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

#### Unité d'emballage livrable :

Désignation	Récipient
ProCare Dent 40	Bouteille de 1 l

#### Contact :

##### Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tél. : +49 800 22 446 44  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Luxembourg

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339  
Tél. : +352 4971120/22  
professional@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

##### Importateur pour la Suisse

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tél. : +41 848 551 670  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/de/professional

##### France

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

##### Belgique

N.V. Miele S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tél. : +32 2 451 15 40  
professional@miele.be  
www.miele.be/nl/p/

##### Canada

Miele Limited  
161 Four Valley Drive  
VAUGHAN  
Ontario L4K 4V8  
KANADA  
Tel. +1 905 532-2270  
customercare@miele.ca  
www.miele.ca



##### Allemagne

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de