

ProCare Dent 30 C

Neutralisatiemiddel

Gebruik:

Vloeibaar concentraat, zuur, op basis van citroenzuur. Voor de automatische instrumentenbehandeling van tandheelkundige instrumenten, inclusief transmissie-instrumenten in thermodesinfectoren van Miele Professional.

Het gebruik van *ProCare Dent 30 C* wordt met name aanbevolen in gevallen waarin instrumenten niet kunnen worden behandeld met neutralisatiemiddelen op basis van fosforzuur (bijv. transmissie-instrumenten).

Kwaliteitskenmerken:

ProCare Dent 30 C voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.  

Als zich een ernstig incident voordoet met het product, meld dit dan aan de fabrikant en de relevante nationale autoriteit.

Producteigenschappen:


- Zeer goede materiaalcompatibiliteit.
- Bevat geen tensides.

Gebruik en dosering:

ProCare Dent 30 C is geformuleerd voor gebruik in processen in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp.
- Er moeten geschikte doseerdispensers worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat het spoelgoed en de afvoerleidingen voldoende compatibel zijn met zuren.
- Gebruiksconcentratie: 1 ml/l
- Programmaselectie: Vario TD
- Minimum doseertemperatuur: $\geq 15^{\circ}\text{C}$

Programmaverloop:

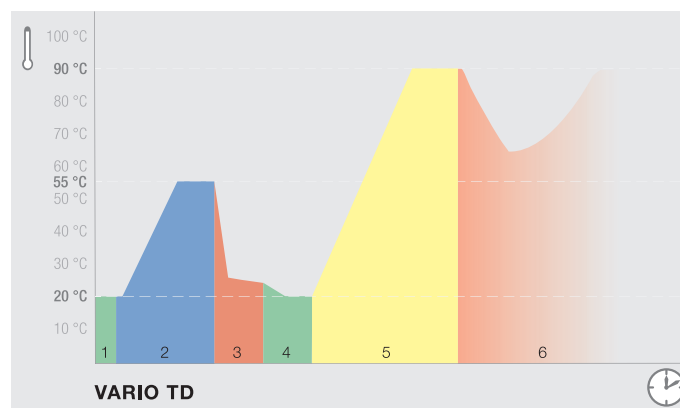

Vario TD-proces:

- 1 Voorspoelen**
Koud water (onthard), geen verwarming, geen proceschemicaliën
- 2 Hoofdreinigingsfase**
Koud/heet water (onthard), met verwarming, met alkalische reinigingsmiddelen
- 3 Neutralisatie**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming, met *ProCare Dent 30 C*
- 4 Tussenspoeling**
Koud/heet water (onthard), geen verwarming
- 5 Thermische desinfectie**
met een naspoeltemperatuur van $> 90^{\circ}\text{C}$ en een houdtijd van max. 5 min tijdens het naspoelen
- 6 Drogen**

Het product in de oplossing moet volledig worden afgespoeld met water. Bij thermodesinfectoren van Miele Professional wordt dit gegarandeerd door het Vario TD-programma bij juist gebruik (bijv. correct spoelgoed). Verificatie vindt plaats door de toename van de geleidbaarheid tijdens het naspoelen te meten tijdens ingebruikneming en routine-onderhoud.

Miele adviseert het gebruik van gedemineraliseerd water in de naspoeling om het spoelgoed en de thermodesinfector te beschermen tegen vlekken en aanslag en om geanodiseerd aluminium te beschermen.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de watertoevoerslangen, met water voordat u van product wisselt.
- De behandeling moet voldoen aan alle verordeningen volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen en moet worden uitgevoerd met geschikte gevalideerde processen.
- Volg de aanbevelingen voor behandeling op van fabrikanten van medische hulpmiddelen met betrekking tot de bepalingen van DIN EN ISO 17664.
- Gebruiksaanwijzingen voor thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor professionele kwaliteit.

ProCare Dent 30 C

Neutralisatiemiddel

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 1 ml/l: ca. 3,0

Inhoudsstoffen volgens Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- Conserveermiddel (2-octyl-2H-isothiazol-3-on)

Opslaginstructies:

- Opslagtemperatuur: -3 °C tot 30 °C
- Kan 3 jaar gebruikt worden onder de juiste opslagomstandigheden.
- Houdbaarheidsdatum: zie etiket naast zandlopersymbool 

Kleurveranderingen van het product kunnen optreden bij opslag in door de fabriek verzegelde verpakkingseenheden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen van het product die relevant zijn voor de toepassing.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze leeg en verzegeld zijn. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Alle informatie hierin is actueel en voor zover wij weten correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen proeven en experimenten uit te voeren. Dit kan niet worden beschouwd als een wettelijke garantie van productkenmerken of -eigenschappen.

Verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Dent 30 C</i>	Jerrycan van 5 l
Opener	voor jerrycans van 5 l, 10 l en 20 l
DTD2 opvangschaal	voor jerrycans van 5 l en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
BELGIEN
Tel. +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
NIEDERLANDE
Tel. +31 347 378-911l
info@miele.nl
www.miele.nl



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Duitsland
www.drweigert.com