

Nachspülmittel

Verwendung:

Flüssigkonzentrat. Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten einschließlich Übertragungsinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

Qualitätsmerkmal:

ProCare Dent 40 erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.



Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Produkteigenschaften:


- Verbessert und beschleunigt die Trocknung von Dentalinstrumenten bei der maschinellen Aufbereitung.
- Verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer werden neutralisiert.

Anwendung und Dosierung:

ProCare Dent 40 ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: 0,3 ml/l über Türdosiergerät für Nachspülmittel
- Programmwahl: Vario TD
- Mindestdosiertemperatur: ≥ 70 °C

Programmablauf:

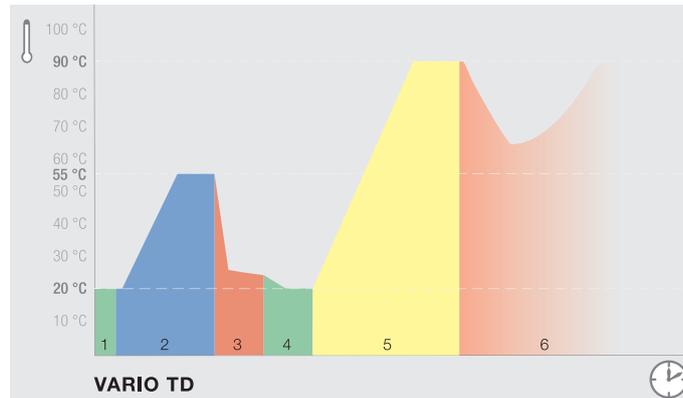

Verfahrensablauf Vario TD:

- 1 Vorspülen
Kaltwasser (enthärtet), ohne Aufheizen
- 2 Reinigen
Kalt- / Warmwasser (enthärtet), mit Aufheizen, mit Prozesschemikalien
- 3 Neutralisieren
Kalt- / Warmwasser (enthärtet), ohne Aufheizen, mit Prozesschemikalien
- 4 Zwischenspülen
Kalt- / Warmwasser (enthärtet), ohne Aufheizen
- 5 Thermische Desinfektion
bei > 90 °C für 5 Minuten inkl. Schlusspülung mit ProCare Dent 40
- 6 Trocknen

Es wird der Einsatz von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen, um Beläge und Wasserflecken zu vermeiden und eloxiertes Aluminium zu schützen.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Thermo-Desinfektoren sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

ProCare Dent 40

Nachspülmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,1 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,3 ml/l: ca. 3,8

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % Phosphonate
- 15 % bis 30 % nichtionische Tenside
- Außerdem Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone)

Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0 °C bis 30 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Dent 40	1 l Flasche

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 446 44
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 4971120/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800-0
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/p

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/



Deutschland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de