

ProCare Dent 10 MA

Detergente

Uso:

Concentrato liquido, mediamente alcalino. Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici compresi strumenti di trasmissione nei termodisinfettori Miele Professional.

ProCare Dent 10 MA favorisce la rimozione dello sporco organico, come p.es. sangue e saliva, e ne impedisce la rideposizione. Si consiglia di rimuovere i residui di compositi, cemento e materiale da impronta prima che induriscano.

Caratteristica di qualità:

ProCare Dent 10 MA soddisfa le norme indicate nella legislazione europea sui dispositivi medici. **CE MD**
Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti.

Caratteristiche del prodotto:


- Elevato rispetto dei materiali.
- Verificare l'idoneità dell'alluminio anodizzato.
- Contiene alcali, tensioattivi ed enzimi.

Uso e dosaggio:

ProCare Dent 10 MA è destinato ai processi nei termodisinfettori Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite una pompa di dosaggio.
- Per il dosaggio utilizzare dosatori adatti.
- Concentrazione di applicazione: da 3 ml/l a 7 ml/l, da 5 min a 10 min, da 45 °C a 55 °C
- Selezione programma: Vario TD
- Temperatura minima di dosaggio: ≥ 40 °C

Svolgimento del programma:

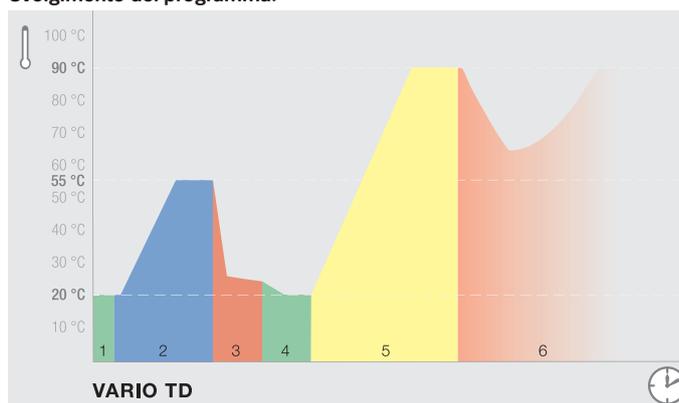

Svolgimento del processo

Vario TD:

- 1 Prelavaggio**
Acqua fredda (addolcita), senza riscaldamento, senza prodotti chimici
- 2 Lavaggio**
Acqua fredda/calda (addolcita), con riscaldamento, con *ProCare Dent 10 MA*
- 3 Neutralizzazione**
Acqua fredda/calda (addolcita), senza riscaldamento, con *ProCare Dent 30 C*
- 4 Risciacquo intermedio**
Acqua fredda/calda (addolcita), senza riscaldamento
- 5 Disinfezione termica**
a > 90 °C per 5 minuti compreso risciacquo finale
- 6 Asciugatura**

La soluzione di applicazione deve essere completamente risciacquata con acqua. In caso di utilizzo nei termodisinfettori Miele Professional, ciò è garantito dal programma Vario TD, se utilizzato correttamente (p.es. corretta disposizione del carico). Un accertamento viene eseguito tramite la misurazione del valore della conducibilità dell'acqua nel ciclo di risciacquo finale durante la messa in servizio o la manutenzione ordinaria del termodisinfettore.

Nel risciacquo finale si consiglia l'impiego di acqua demineralizzata per evitare che si formino patine o macchie di acqua e per proteggere l'alluminio anodizzato.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Prima di cambiare prodotto, risciacquare bene con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi di aspirazione.
- Il trattamento deve essere eseguito ai sensi della legislazione sui dispositivi medici e delle regolamentazioni in vigore con processi adatti e convalidati.
- Rispettare le raccomandazioni sul trattamento del produttore dei dispositivi medici in base alla norma DIN EN ISO 17664.
- Rispettare le istruzioni d'uso dei termodisinfettori Miele Professional.
- Solo per uso industriale.

Detergente

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): ca. 1,1 g/cm³
- Valore pH (definito in acqua demineralizzata, 20 °C) da 3 ml/l a 7 ml/l: ca. da 10,6 a 10,7

Ingredienti per detersivo secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004

- < 5 % tensioattivi non ionici e anionici
- Inoltre enzimi

Indicazioni di conservazione:

- Temperatura di conservazione da rispettare: da 0 °C a 25 °C
- Proteggere dalla luce del sole.
- Utilizzabile per 2 anni se la conservazione è corretta.
- Scadenza: vedi stampa sull'etichetta dietro il simbolo 

Nel corso della conservazione, nei fusti originali si possono verificare delle alterazioni del colore. Le caratteristiche tecniche d'impiego non subiscono alterazioni.

Indicazioni di pericolo e sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate di seguito.

Smaltire solo contenitori vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezioni e accessori disponibili:

Denominazione	Confezione
<i>ProCare Dent 10 MA</i>	Tanica da 5 l
Chiave per tanica	Per taniche da 5 l, 10 l e 20 l
DTD2 vaschetta di raccolta	Per taniche da 5 l e da 10 l

Contatti:**Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 Appiano/San Michele (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

**Germania**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de