

ProCare Dent 11 A

Detergente

Uso:

Detersivo in polvere, alcalino. Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici nei termodisinfettori Miele Professional.

ProCare Dent 11 A favorisce la rimozione dello sporco organico, come p.es. sangue e saliva, e ne impedisce la rideposizione. Si consiglia di rimuovere i residui di compositi, cemento e materiale da impronta prima che induriscano.

ProCare Dent 11 A non è adatto al lavaggio degli strumenti di trasmissione. Per questo si consiglia il detergente liquido *ProCare Dent 10 MA*.

Caratteristica di qualità:

ProCare Dent 11 A soddisfa le norme indicate nella legislazione europea sui dispositivi medici.  

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti.

Caratteristiche del prodotto:

- Elevata protezione del materiale.
- Protezione dalla corrosione per strumenti e tray in acciaio inossidabile.


Uso e dosaggio:

ProCare Dent 11 A è destinato ai processi nei termodisinfettori Miele Professional.

- Dosaggio tramite il dosatore per detersivi in polvere.
- Per il dosaggio utilizzare dosatori adatti.
- Concentrazione: 3 g/l
- Selezione programma: Vario TD
- Temperatura minima di dosaggio: ≥ 40 °C

Deve essere dosata sempre la stessa quantità di detersivo, preferibilmente utilizzando il cucchiaino dosatore fornito con il prodotto.

Svolgimento del programma:

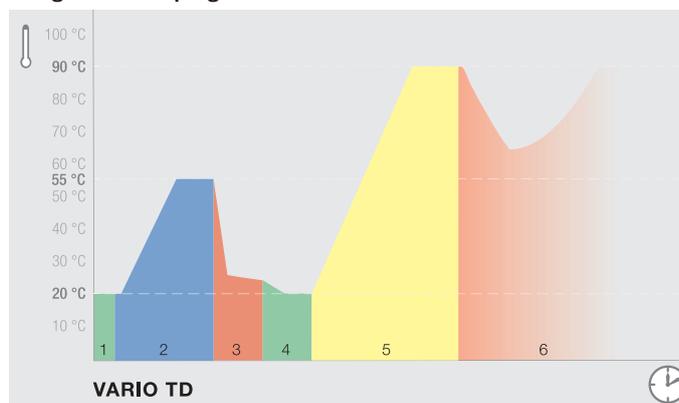

Svolgimento del processo

Vario TD:

- 1 Prelavaggio**
Acqua fredda (addolcita), senza riscaldamento, senza prodotti chimici
- 2 Lavaggio**
Acqua fredda/calda (addolcita), con riscaldamento, con *ProCare Dent 11 A*
- 3 Neutralizzazione**
Acqua fredda/calda (addolcita), senza riscaldamento, con *ProCare Dent 30 P*
- 4 Risciacquo intermedio**
Acqua fredda/calda (addolcita), senza riscaldamento
- 5 Disinfezione termica**
a > 90 °C per 5 minuti compreso risciacquo finale
- 6 Asciugatura**

La soluzione di applicazione deve essere completamente risciacquata con acqua. Al termine del processo non devono essere visibili residui di detersivo. In caso di utilizzo nei termodisinfettori Miele Professional, ciò è garantito dal programma Vario TD, se utilizzato correttamente (p.es. corretta disposizione del carico). Un accertamento viene eseguito tramite la misurazione del valore della conducibilità dell'acqua nel ciclo di risciacquo finale durante la messa in servizio o la manutenzione ordinaria del termodisinfettore. Nel risciacquo finale si consiglia l'impiego di acqua demineralizzata per evitare che si formino patine o macchie di acqua.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Il trattamento deve essere eseguito ai sensi della legislazione sui dispositivi medici e delle regolamentazioni in vigore con processi adatti e convalidati.
- Rispettare le raccomandazioni sul trattamento del produttore dei dispositivi medici in base alla norma DIN EN ISO 17664.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso dei termodisinfettori Miele Professional.
- Solo per uso industriale.

ProCare Dent 11 A

Detergente

Dati tecnici:

- Densità ca. da 1.015 g/l a 1.065 g/l
- Valore pH (definito in acqua demineralizzata, ca. 20 °C) 3 g/l: ca. 11,5

Ingredienti per detersivo secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004

- < 5 % tensioattivi non ionici
- > 30 % fosfati

Indicazioni di conservazione:

- Temperatura di conservazione da rispettare: da 0 °C a 30 °C
- Richiudere il coperchio dopo aver prelevato il prodotto. Il prodotto potrebbe formare dei grumi a causa dell'umidità e perdere di efficacia.
- Utilizzabile per 2 anni se la conservazione è corretta.
- Scadenza: vedi stampa sull'etichetta dietro il simbolo 

Indicazioni di pericolo e sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate di seguito.

Smaltire solo contenitori vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezioni disponibili:

| Denominazione | Tanica |
|--------------------------|------------------|
| <i>ProCare Dent 11 A</i> | Secchio da 10 kg |
| <i>ProCare Dent 11 A</i> | Flacone da 1 kg |

Contatti:**Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tél. : +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Italia

Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione 27,
39057 Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/professional

**Germania**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de