

# ProCare

Med 40

## Biocompatibel glansspoelmiddel

### Gebruiksaanwijzingen

#### Toepassing

ProCare 40 is een spoel- en droogmiddel, gedoseerd in het laatste spoelwater in was- en desinfectieapparaten voor herbruikbare, invasieve en niet-invasieve, thermostabiele en thermoleerbare medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumenten, microchirurgische en instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie, gebruiksvorwerpen evenals Steelco grote was- en desinfectieapparaten voor ziekenhuisbedden etc.

#### Eigenschappen

ProCare Med 40 een spoelmiddel met de volgende eigenschappen:

- Verlaagt de oppervlaktespanning van water
- Vermindert waterstrepen op artikelen
- Verkort de droogtijd aanzienlijk
- Goedgekeurde biocompatibiliteit
- pH-neutraal

#### Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor RVS, (geanodiseerd) aluminium, non-ferro metalen, PVC, rubber, kunststoffen, keramiek. Bij apparaten en componenten gemaakt van polysulfon (PSU) en polyfenylsulfon (PPSU), PVC, rubber kunnen er spanningsscheuren ontstaan. Voer daarom voorafgaand aan het gebruik een geschiktheidstests uit.

Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

#### Dosering en toepassing

Afhankelijk van de waterkwaliteit geeft een dosering van 0,3 tot 1,0 ml/L goede resultaten. Voor thermische of chemothermische desinfectie (eindspoeling) moet altijd DI/RO-water (deïonisatie/omgekeerde osmose) worden gebruikt. De minimale doseertemperatuur is 40 °C.

Voor was- en desinfectieapparaten van Miele en Steelco wordt er specifieke informatie over de volledige programmacyclus gegeven voor verschillende medische disciplines in de betreffende gebruiksaanwijzingen.

#### Houd rekening met het volgende!

Niet geschikt voor anesthesie-benodigdheden. • Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • De verwerking moet voldoen aan alle verordeningen conform de voorschriften voor medische hulpmiddelen en dient middels geschikte gevalideerde processen te worden uitgevoerd. • In overeenstemming met nationale richtlijnen en/of EN ISO 15883 is een prestatiekwalificatie vereist. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met betrekking tot de bepalingen van ISO 17664. • Neem de gebruiksaanwijzingen van Miele/Steelco was- en desinfectieapparaten in acht. • Voor gebruik in andere was- en desinfectieapparaten dan die van Miele/Steelco, raadpleeg de fabrikant van de was- en desinfectieapparaten en de betreffende gebruiksaanwijzing.

# ProCare

**Med 40**

## Biocompatibel glansspoelmiddel

### Technische gegevens

Dichtheid (concentraat): 1,0 g/mL

pH-waarde (1 % oplossing in gedemineraliseerd water): ca. 7,9

Uiterlijk (concentraat): transparant, kleurloos tot geel

### Ingrediënten

Oppervlakte-actieve stoffen, organische zuren, conserveermiddelen

### Transport en opslag

Transporteer en bewaar dit product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.

Dit medisch hulpmiddel is gevoelig voor lage temperaturen. Als de omgevingstemperatuur van het transport waarschijnlijk lager is dan 5 °C, moet dit product worden vervoerd met een temperatuurgecontroleerde vrachtwagen/zeecontainer boven 5 °C, of met gebruik van beschermhoezen/kappen waarbij de omgevingstemperatuur niet langer dan 10 uur onder minus 5 °C komt.

### Informatie over verwijdering en recycling

Reservoirs, schroefdooppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing, dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.

### Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.

### CE-markering

ProCare Med 40 voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

### Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

### Contactgegevens

#### Duitsland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN  
Tel.+31 347 378-884  
Fax+31 347 378-429  
professional@miele.nl  
serviceprofessional@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### Italië

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 MOLLEM  
Tel. +32 2 4511-540  
Fax +32 2 4511-414  
professional@miele.be  
www.miele.be/fr/professional  
www.miele.be/nl/professional

#### Fabrikant

##### Zwitserland

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch