

ProCare

Med 64 LUB

Smörjmedel för manuell användning

Bruksanvisning

Användning

ProCare Med 64 LUB är en högkvalitativ vårdande produkt för instrument i sprayform utformad för manuell skötsel av återanvändbara, invasiva och icke-invasiva, värmestabila medicintekniska produkter som exempelvis kirurgiska instrument med rörliga delar som leder, gångjärn, gängor, förslutningar och andra glidytor såsom klämmor, tänger, saxar, stansar, nålförre, retraktorer, ligatorer osv. Produkten används efter noggrann rengöring och desinfektion, före ångsterilisering.

Egenskaper

ProCare Med 64 LUB är ett manuellt smörjmedel för instrument med följande egenskaper:

- Baserat uteslutande på vitolja av medicinsk kvalitet.
- Fritt från alla typer av potentiellt allergiframkallande tillsatser.
- Lämnar en tunn film på de behandlade ytorna som förhindrar friktion metall mot metall.
- Förhindrar effektivt friktion metall mot metall och skyddar instrument med gångjärn mot nötningskorrosion, rost, missfärgning, fläckar och för tidigt slitage av instrumenten.
- Dokumenterad ånggenomsläplighet.
- Kompatibelt med ångsterilisering.
- Toxikologiskt säkert enligt förordningar om läkemedel och livsmedel.
- Spraytillsats som kan justeras till önskad längd.

Materialkompatibilitet

Lämpligt för alla metaller som vanligtvis används i medicintekniska produkter. Inkompatibilitet med polymerer kan förekomma, beroende på typen av polymer.

Kontakta din lokala representant för att få information om lämpligheten för andra material som inte nämns ovan.

Dosering och användning

För optimal instrumentskötsel ska instrumenten, efter en noggrann rengöring, desinfektion och torkning, svalna till rumstemperatur innan produkten appliceras, för att undvika nötning av metall och ytskador. Instrumenten måste vara helt torra innan ProCare Med 64 LUB appliceras.

Spraya kort och selektivt instrumentens leder, gångjärn, glidytor, gängor och andra rörliga delar med ProCare Med 64 LUB från kortast möjliga avstånd med hjälp av den medföljande spraytillsatsen. Håll sprayburken vertikalt för att spraya. Distributionen av smörjmedlet gynnas av att därefter röra på de rörliga delarna. Överflödiga olja måste avlägsnas med en ny, ren trasa före sterilisering.

Obs!

Blanda inte med andra produkter. • Kontakta Miele/Steelco Service vid byte av produkter. • Följ rekommendationerna för rekonditionering från instrumentens tillverkare med avseende på kraven i ISO 17664.

ProCare

Med 64 LUB

Smörjmedel för manuell användning

Tekniska uppgifter

Densitet: 0,9 g/ml.

pH-värde: neutralt.

Utseende: färglöst.

Ingredienser

Medicinsk vitolja (Pharm. Eur.) och drivgas (propan, butan).

Transport och förvaring

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Skydda produkten från direkt solljus och håll den borta från värme- och antändningskällor.

Information om kassering och återvinning

Burken är tillverkad av återvinningsbart aluminium. Lokala bestämmelser om avfall ska följas vid kassering av tomma burkar.

Säkerhetsinformation

Information om säkerhet i arbetet och kassering av oanvända produkter finns i säkerhetsdatabladet.

Undvik bildning av aerosoler och andas inte in aerosoler.

CE-märkning

ProCare Med 64 LUB uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglighet

Fråga din lokala representant om aktuella storlekar på behållare.

Kontaktuppgifter

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel.+46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Tillverkare

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch