

# ProCare

Med 13 PRE

## Espuma de pré-tratamento enzimático, levemente alcalina

### Instruções de utilização

#### Aplicação

O ProCare Med 13 PRE é uma espuma de limpeza enzimática levemente alcalina, pronta para uso, baseada numa combinação especial de enzimas e tensoativos para manter os dispositivos médicos reutilizáveis, invasivos e não invasivos, termoestáveis e termolábeis contaminados com sangue e tecido orgânico, tais como instrumentos e utensílios cirúrgicos, instrumentos MIS, endoscópios rígidos e outros equipamentos médicos húmidos e para protegê-los contra a corrosão durante o transporte, desde o seu ponto de uso até à área de processamento.

#### Propriedades

Baseado na sua fórmula enzimática especial, o ProCare Med 13 PRE mantém os instrumentos eficientemente húmidos e oferece as seguintes propriedades:

- Minimiza a adesão de manchas cirúrgicas orgânicas e, por isso, permite uma limpeza mais fácil na máquina de lavar e desinfetar.
- Protege contra a corrosão
- Boa capacidade de enxaguamento já à temperatura ambiente
- Espuma estável
- Adequado para alumínio e alumínio anodizado
- Seguro e sustentável para utilizador e paciente

#### Compatibilidade de materiais

Adequado para aço inoxidável, alumínio (anodizado), titânio e outros metais não ferrosos, materiais cromados, elastómeros, incluindo poliuretano e silicone, politetrafluoroetileno (PTFE, p. ex., teflon), borracha e látex, vidro, material de cerâmica. Não existe compatibilidade conhecida com qualquer material.

Para saber sobre materiais não mencionados acima, por favor, contacte o seu representante local para verificar se o material é adequado.

#### Dosagem e aplicação

O ProCare Med 13 PRE é um spray de espuma, pronto a usar, para ser aplicado diretamente em itens contaminados no ponto de utilização do dispositivo médico, imediatamente após a sua utilização. Deve ser pulverizado de modo a garantir uma cobertura completa e a humidificação dos instrumentos, para obter a eficácia ideal.

O enxaguamento da espuma antes do posterior reprocessamento ou uma pré-lavagem na máquina de lavar e desinfetar pode ser benéfico para a estabilidade do processo automático.

#### Atenção!

Não misture com outros produtos! • Ligue para a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • Observe as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes de instrumentos, no que diz respeito às disposições da norma ISO 17664.

# ProCare

**Med 13 PRE**

## Espuma de pré-tratamento enzimático, levemente alcalina

### Dados técnicos

Densidade (solução pronta a usar): 1,0 g/mL  
Valor de pH (solução pronta a usar): aprox. 8.4  
Aparência (solução pronta a usar): límpido, incolor

### Ingredientes

Tensioativos, enzimas, solubilizantes, conservantes

### Transporte e armazenamento

Transporte e armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.  
Este dispositivo médico é sensível a temperaturas frias. Se a temperatura ambiente do transporte for provavelmente inferior a 5 °C, este produto deve ser enviado através de camião com temperatura controlada/contentor marítimo com temperatura acima de 5 °C, ou com capas de proteção para transporte, sem que a temperatura desça abaixo dos 5 °C durante mais de 10 horas.

### Informações sobre eliminação e reciclagem

Recipientes, tampas de rosca e rótulos são feitos de polietileno reciclável. Para eliminar recipientes usados, incluindo aqueles que tenham produtos residuais e solução processada, devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo e às águas residuais. Para a eliminação de produtos não utilizados, consulte a ficha de dados de segurança.

### Informações sobre segurança

Para saber informações sobre segurança no trabalho, consulte a ficha de dados de segurança.

### Marcação CE

O ProCare Med 13 PRE cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

### Disponibilidade

Por favor, pergunte ao seu representante local sobre os tamanhos atuais do recipiente.

### Dados de contacto

#### Alemanha

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Portugal

Miele Portuguesa Lda.  
Av. do Forte, n°5  
2790-073 CARNAXIDE  
Tel. +351 21 4248-100  
Fax +351 21 4248-109  
professional@miele.pt  
professionalservice@miele.pt  
www.miele.pt/professional

#### Itália

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

### Fabricante

#### Suíça

Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch