

ProCare

Med 13 PRE

Espuma de tratamiento previo enzimática, ligeramente alcalina

Instrucciones de uso

Aplicación

ProCare Med 13 PRE es una espuma de limpieza enzimática ligeramente alcalina lista para usar que consta de una combinación especial de enzimas y tensioactivos y que sirve para mantener húmedos los dispositivos médicos reutilizables, invasivos y no invasivos, termoestables y termolábiles que hayan sido contaminados con sangre o con tejido orgánico, como el instrumental y los utensilios quirúrgicos, los instrumentos MIC, los endoscopios rígidos y otros equipos médicos. También sirve para protegerlos de la corrosión durante el transporte desde su lugar de uso a la zona de tratamiento.

Propiedades

Gracias a su fórmula especial y enzimática, ProCare Med 13 PRE mantiene el instrumental húmedo de una forma eficaz y ofrece las siguientes propiedades:

- Minimiza la adhesión de suciedad quirúrgica orgánica y, por lo tanto, facilita el proceso de limpieza y desinfección en las lavadoras desinfectadoras.
- Protege contra la corrosión.
- Fácil aclarado incluso a temperatura ambiente.
- Espuma estable.
- Compatible con aluminio y con aluminio anodizado.
- Seguro y sostenible tanto para el usuario como para el paciente.

Compatibilidad con materiales

Compatible con acero inoxidable, aluminio (anodizado), titanio y otros metales no ferrosos, materiales cromados, materiales plásticos, elastómeros, incluidos el poliuretano y la silicona, politetrafluoroetileno (PTFE, por ejemplo, teflón), caucho y látex, vidrio y materiales cerámicos. No se conoce ninguna incompatibilidad de materiales.

Para los materiales que no se hayan mencionado anteriormente, póngase en contacto con su delegado comercial quien le indicará si es adecuado o no.

Dosificación y aplicación

ProCare Med 13 PRE es una espuma en aerosol lista para usar que se aplica directamente sobre artículos contaminados en el lugar de uso de los productos sanitarios directamente después de usarlos. Se debe pulverizar de tal forma que se garantice una cobertura total y la humectación del instrumental para conseguir una eficiencia óptima.

Puede resultar útil aclarar la espuma antes de continuar con el tratamiento o preaclarar en la lavadora desinfectadora para garantizar la estabilidad del proceso automatizado.

Tenga en cuenta lo siguiente

No mezclar con otros productos. • Llamar al servicio técnico de Miele/Steelco a la hora de cambiar productos. • Tener en cuenta las recomendaciones sobre el tratamiento posterior emitido por los fabricantes del instrumental en relación con las disposiciones de la norma ISO 17664.

ProCare

Med 13 PRE

Espuma de tratamiento previo enzimática, ligeramente alcalina

Ficha técnica

Densidad (solución lista para usar): 1.0 g/mL

Valor de pH (solución lista para usar): aprox. 8.4

Aspecto (solución lista para usar): transparente, incolora

Ingredientes

Tensioactivos, enzimas, solubilizantes, conservantes

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C.

Este producto sanitario es sensible a las bajas temperaturas. Si es posible que la temperatura ambiente durante el transporte baje de los 5 °C, el producto deberá enviarse utilizando un contenedor para camión o un contenedor marítimo con control de temperatura por encima de los 5 °C. También se podrá transportar utilizando cubiertas de protección para el transporte que garanticen que la temperatura ambiente no caiga por debajo de los menos 5 °C durante más de 10 horas.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los envases, los tapones de rosca y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Para la eliminación de envases utilizados, incluidos los que contengan producto residual y solución procesada, se deben seguir las directrices locales sobre residuos y sobre aguas residuales.

Para obtener información sobre la eliminación de un producto sin utilizar, consulte la ficha técnica de seguridad.

Información sobre seguridad

Para obtener información sobre seguridad laboral, consulte la ficha técnica de seguridad.

Marcado CE

ProCare Med 13 PRE cumple con los requisitos para los productos sanitarios en conformidad con el Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745.

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, consulte a su representante.

Información de contacto

Alemania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
Fax +34 916620266
professional@miele.es
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante

Suiza

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch