

# ProCare

Med 10 A

## Universeel alkalisch reinigingsmiddel voor geautomatiseerde verwerking

### Gebruiksaanwijzingen

#### Toepassing

ProCare Med 10 A is een materiaalvriendelijk, alkalisch reinigingsmiddel voor was- en desinfectieapparaten voor de geautomatiseerde verwerking van herbruikbare, thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen zoals chirurgische, microchirurgische en instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie, anesthesie- en beademingsapparatuur en andere medische apparatuur.

#### Eigenschappen

ProCare Med 10 A is een alkalisch reinigingsmiddel met de volgende eigenschappen:

- Verwijdert behoedzaam maar effectief bloed, weefselresten, eiwitten
- Uitstekende eigenschappen voor het verwijderen en dispergeren van vervuiling
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik in was- en desinfectieapparaten
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit
- Vrij van oppervlakte-actieve stoffen en bijtende alkaliën

#### Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor roestvrij staal, kunststoffen, elastomeren, rubber, latex, keramiek en glas. Niet compatibel met (geanodiseerd) aluminium en titanium.

Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

#### Dosering en toepassing

De optimale dosering is afhankelijk van onder meer de hardheid van het water en de aard van de verontreiniging. Over het algemeen verbetert het gebruik van onthard water het reinigingsresultaat. Hierdoor kan de dosering worden verlaagd.

In de praktijk geeft een dosering van 3 tot 10 ml/L goede resultaten met een minimum van 10 minuten bij 60 °C.

Zorg voor een goede tussenspoeling na de reinigingsfase met water of ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C in het geval van anesthesiemateriaal) gedurende minimaal 1 min. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ProCare Med 30 P voor meer informatie.

Voor was- en desinfectieapparaten van Miele en Steelco wordt er specifieke informatie over de volledige programmacyclus gegeven voor verschillende medische disciplines in hun betreffende gebruiksaanwijzingen.

#### Houd rekening met het volgende!

Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • De verwerking moet voldoen aan alle verordeningen conform de voorschriften voor medische hulpmiddelen en dient middels geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd. • In overeenstemming met nationale richtlijnen en/of EN ISO 15883 is een prestatiekwalificatie vereist. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met betrekking tot de bepalingen van ISO 17664. • Neem de gebruiksaanwijzingen van Miele/Steelco was- en desinfectieapparaten in acht. • Voor gebruik in andere was- en desinfectieapparaten dan die van Miele/Steelco, raadpleeg de fabrikant van de was- en desinfectieapparaten en de betreffende gebruiksaanwijzing.

# ProCare

**Med 10 A**

## Universeel alkalisch reinigingsmiddel voor geautomatiseerde verwerking

### Technische gegevens

Dichtheid (concentraat): 1,4 g/mL

pH-waarde (1 % oplossing in gedemineraliseerd water): ca. 11,3

Uiterlijk (concentraat): transparant, kleurloos

### Ingrediënten

Alkali, complexvormers, corrosieremmend middel, sequestreermiddelen

### Transport en opslag

Bewaar het product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.

### Informatie over verwijdering en recycling

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing, dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.

### Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.

### CE-markering

ProCare Med 10 A voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

### Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

### Contactgegevens

#### Duitsland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN  
Tel.+31 347 378-884  
Fax+31 347 378-429  
professional@miele.nl  
serviceprofessional@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### Italië

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 MOLLEM  
Tel. +32 2 4511-540  
Fax +32 2 4511-414  
professional@miele.be  
www.miele.be/fr/professional  
www.miele.be/nl/professional

#### Fabrikant

##### Zwitserland

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch