

ProCare

Med 30 C

Neutralisationsmittel auf Basis von organischer Säure

Gebrauchsanweisung

Verwendung

ProCare Med 30 C ist ein saures Neutralisationsmittel für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, das nach der maschinellen, mildalkalischen Reinigung von Medizinprodukten angewendet wird. Dazu zählen wiederverwendbare thermostabile und thermolabile, invasive und nicht-invasive Medizinprodukte wie chirurgische Instrumente, mikrochirurgische Instrumente und Instrumente der minimal invasiven Chirurgie, starre Endoskope, Anästhesie- und Beatmungsmaterial, Stationsutensilien, Sterilisationsbehälter aus Aluminium und andere medizinische Geräte.

Produkteigenschaften

ProCare Med 30 C ist ein mildsaures Neutralisationsmittel mit den folgenden Eigenschaften:

- Entfernt sanft alkalische Rückstände von aufbereiteten Objekten
- Kann den Werterhalt von Instrumenten sicherstellen, indem es Flecken auf Objekten verhindert, die mit alkalischen Reinigungsmitteln aufbereitet wurden. Diese Flecken könnten später im Aufbereitungszyklus irreversible Materialschäden verursachen, z. B. bei der Sterilisation.
- Geeignet für Anästhesiematerial
- Geeignet für Aluminium
- Frei von Tensiden
- Phosphatfrei

Materialverträglichkeit

Geeignet für Edelstahl, (eloxiertes) Aluminium, Kunststoffe, Gummi, Glas und Keramik.

Für Materialien, die oben nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um in Erfahrung zu bringen, ob das Produkt für das Material geeignet ist.

Dosierung und Anwendung

Die optimale Dosierung hängt im Wesentlichen vom Umfang der alkalischen Rückstände ab. Stellen Sie sicher, dass die Spüllauge vor der Neutralisation vollständig entfernt wird. In der Praxis hat sich für die Neutralisation eine Dosierung von 1 bis 3 mL/L bewährt, wobei die Neutralisation nach der Reinigung mit einem alkalischen Reinigungsmittel wie ProCare Med 10 MA mindestens 1 Minute lang durchgeführt werden sollte. Weitere Informationen zur Verwendung von ProCare Med 10 MA finden Sie in der Gebrauchsanweisung für dieses Mittel.

Stellen Sie sicher, dass nach jeder Neutralisation mit ProCare Med 30 C eine sorgfältige, mindestens einminütige Zwischenspülung erfolgt, damit keine Rückstände auf dem aufbereiteten Objekt bleiben und Korrosion verhindert wird.

Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele und Steelco werden spezielle Informationen zu den vollständigen Programmzyklen für verschiedene medizinische Fachrichtungen in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen angegeben.

Bitte beachten!

Nicht mit anderen Produkten mischen. • Vor einem Produktwechsel wenden Sie sich bitte an Miele/Steelco. • Die Aufbereitung muss entsprechend aller Vorschriften im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu Medizinprodukten erfolgen und mit geeigneten, validierten Verfahren durchgeführt werden. • Im Rahmen nationaler Vorschriften bzw. der EN ISO 15883 ist eine Leistungs-Qualifikation (LQ) erforderlich. • Halten Sie sich an die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der ISO 17664. • Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele/Steelco. • Wenn Sie das Produkt für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von einem anderen Anbieter als Miele/Steelco verwenden wollen, beachten Sie die Bedienungsanleitung und Anweisungen des entsprechenden Herstellers.

ProCare

Med 30 C

Neutralisationsmittel auf Basis von organischer Säure

Technische Daten

Dichte (Konzentrat): 1.2 g/mL

pH-Wert (1 % Lösung in vollentsalztem Wasser): ca. 2.6

Aussehen (Konzentrat): transparent, farblos

Inhaltsstoffe

Organische Säure

Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C zu lagern.

Entsorgung und Recycling

Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycelbarem Polyethylen. Für die Entsorgung gebrauchter Behälter, einschliesslich solcher mit Produktrückständen und aufbereiteter Lösung, müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften beachtet werden. Für die Entsorgung des ungebrauchten Produkts beachten Sie bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Informationen zur Arbeitssicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung

ProCare Med 30 C erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäss Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

Verfügbarkeit

Bei Fragen zu aktuellen Behältergrössen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Kontaktdaten

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Geschäftsbereich Professional
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 800 22 44 644
Fax +49 800 33 55 533
vertrieb@miele-professional.de
service@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italien

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Hersteller

Schweiz

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch