

ProCare

Med 13 PRE

Bruksanvisning

Mildt alkalisk, enzymatisk forbehandlingsskum

Bruksområde

ProCare Med 13 PRE er et bruksklart, mildt alkalisk enzymatisk rengjørings-skum som er basert på en spesiell kombinasjon av enzymer og overflateaktive midler for å holde gjenbrukbare, invasive og ikke-invasive, termostabile og termolabile medisinske enheter som er kontaminerte med blod og organisk vev, for eksempel kirurgiske instrumenter og redskaper, MIS-instrumenter, stive endoskop og annet medisinsk utstyr fuktige og beskytte dem mot korrosjon under transport fra bruksstedet til behandlingsstedet.

Egenskaper

Basert på den spesielle, enzymatiske formuleringen holder ProCare Med 13 PRE instrumentene effektivt fuktige og har følgende egenskaper:

- Gir mindre tilhefting av organisk smuss ved kirurgi, og gjør det dermed lettere å rengjøre innsiden av rengjørings-/desinfiseringsapparatet
- Beskytter mot korrosjon
- God skylleevne allerede ved omgivelsestemperatur
- Stabilt skum
- Egnert for aluminium og anodisert aluminium
- Trygg og holdbar for brukeren og pasienten

Materialkompatibilitet

Egnert for rustfritt stål, (adonisert) aluminium, titan og andre ikke-jernholdige metaller, krombelagte materialer, plastmaterialer, elastomere, inkludert polyuretan og silikon, polytetrafluoretylen (PTFE, f.eks. Teflon), gummi og lateks, glass og keramiske materialer. Det finnes ingen kjent inkompatibilitet med materialer.

For materialer som ikke er nevnt ovenfor, ta kontakt med din lokale representant for å fastslå om materialet er egnert.

Dosering og bruk

ProCare Med 13 PRE er en bruksklar skumspray som skal påføres direkte på kontaminerte gjenstander på bruksstedet for det medisinske utstyret rett etter bruk. Den skal sprayes slik at det oppnås fullstendig dekning og fukting av instrumenter, og for å oppnå optimal effekt. Det kan være gunstig å skylle vekk skummet før videre behandling eller å utføre tilstrekkelig forskylling i rengjørings-/desinfiseringsapparatet for å oppnå en stabil automatisert prosess.

OBS!

Må ikke blandes med andre produkter! • Ring serviceavdelingen hos Miele/Steelco for erstatning av produkter. • Følg anbefalingene om gjenbehandling fra instrumentprodusentene med hensyn til bestemmelsene i ISO 17664.

ProCare

Med 13 PRE

Mildt alkalisk, enzymatisk forbehandlingsskum

Tekniske data

Tetthet (bruksklar oppløsning): 1,0 g/ml

pH-verdi (bruksklar oppløsning): ca. 8,4

Utseende (bruksklar oppløsning): gjennomsiktig, fargeløs

Innholdsstoffer

Overflateaktive midler, enzym, løsemidler, konserveringsmidler

Transport og oppbevaring

Transporter og oppbevar dette produktet ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C.

Denne medisinske enheten er følsom for kulde. Hvis omgivelsestemperaturen under transport sannsynligvis vil være under 5 °C, må dette produktet sendes i en temperaturkontrollert lastebil/sjøcontainer over 5 °C, eller ved bruk av beskyttelsesdeksler for transport der omgivelsestemperaturen ikke synker under minus 5 °C i mer enn 10 timer.

Informasjon om kassering og resirkulering

Beholdere, skrukorker og etiketter består av resirkulerbart polyetylen. For kassering av brukte beholdere, inkludert de som inneholder produktrester og behandlet oppløsning, skal lokale bestemmelser for avfall og avfallsvann følges.

Se sikkerhetsdatabladet for kassering av ubrukte produkter.

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsdatabladet for informasjon om sikkerhet på arbeidsplassen.

CE-merking

ProCare Med 13 PRE oppfyller kravene til medisinsk utstyr i henhold til forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

Tilgjengelighet

Spør din lokale representant om gjeldende beholderstørrelser.

Kontaktopplysninger

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Tel.+47 6717-3100
Fax+47 6717-3110
professional@miele.no
www.miele.no/professional

Italia

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Produsent

Sveits

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch